




Druppelbrillen

Druppelbril



De Druppelbril van Druppelzorg® is een uitkomst voor mensen met oogklachten. Vaak kost het veel moeite om oogdruppels op de juiste manier, zonder te morsen, aan te brengen. Dit is erg problematisch en de hulpmiddelen die er zijn zijn vaak relatief duur of slechts geschikt voor één merk/soort oogdruppels. Met de Druppelbril zijn deze problemen voorgoed verleden tijd. De bril bevat verschillende openingen, en is zo ontworpen dat alle gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen en stevig vastzitten. Door dit ontwerp heeft u maar één bril nodig. Kies simpelweg de opening waar uw flesje goed in blijft zitten. De druppelbril wordt geleverd in een stoffen etui. **Gebruiksaanwijzing:** 1. Volg altijd de aanwijzingen van uw arts; 2. Was uw handen; 3. Plaats het doseerflesje of -flacon in een passende opening van de bril, zodat het stevig vastzit; 4. Zet de bril op; 5. Buig uw hoofd achterover, zodanig dat het doseerflesje verticaal boven uw oog zit; 6. Houd met een hand uw oog open; 7. Doseer met uw andere hand de druppels door in het flesje te knijpen; 8. Na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol of een desinfecterend middel en drogen met een schone doek.

LET OP : De bril is niet geschikt voor Minims pipetten. Door de lange hals kan de pipet in contact komen met uw oog. **Bestel tip:** Wij geven u de tip om meer dan 1 druppelbril tegelijk te bestellen. Bijvoorbeeld voor de boven- en benedenverdieping, in uw tas of voor familie en bekenden. Voor deze prijs heeft u een hoop gebruiksgemak!

<https://www.ad.nl/binnenland/de-druppelbril-van-evert-86-en-appie-84-is-een-regelrechte-hit~a46ea94b/>

Extra-informatie	Artikelnummer	Prijs
1-stuks	960000	€
2-stuks	960000-2st	€
5-stuks	960000-5st	€