



DianaTalks Nederlands sprekend horloge

- Nederlands sprekend (en 5 andere talen)
- analoog / digitaal / touch
- makkelijk instelbaar

DianaTalks is een sprekend horloge, met een hoogwaardige geluidskwaliteit in wel 6 talen (Nederlands, Duits, Spaans, Engels, Frans en Italiaans). De versies Touch en Large beschikken nog over 4 extra talen, namelijk: Zweeds, Deens, Noors en Fins.


De wijzerplaat van dit horloge is analoog (in de versies Small, Large en Royal) en heeft voor een duidelijk contrast een witte achtergrond met zwarte cijfers en wijzers. Bij de nieuwe versie 'Touch' is het scherm zwart en wordt de uitspraak van de tijd geactiveerd door het scherm aan te raken, wat ideaal is voor mensen die volledig blind zijn.

Instellen DianaTalks

Met een draaiknop kunt u de wijzers op de juiste tijd instellen. Als u de spreekknop 3 seconden ingedrukt houdt, klinken er twee korte piepsignalen en is de spreekfunctie ingeschakeld. Het horloge spreekt vervolgens de tijd en de dag van de week digitaal of analoog uit, afhankelijk van wat u heeft ingesteld. Dit gaat als volgt:

16:56 – Digitaal: *“vrijdag, zestien uur zesenvijftig”*

https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_digital.mp3

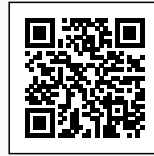

16:56 – Analoog: *“Het is vier minuten voor vijf, vrijdagmiddag”*

https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_analog.mp3

Als u de spreekknop 5 seconden ingedrukt houdt, klinkt er één kort piepsignaal en is de spreekfunctie in slaapstand.

Dit DianaTalks horloge heeft drie verborgen knoppen, namelijk één voor het instellen van de taal, één voor het instellen van dag en tijd en één voor het instellen van een analoge of digitale tijdweergave. U kunt deze verborgen knoppen met een puntig voorwerp, zoals een balpen of een tandenstoker, bedienen. Dit om te voorkomen dat u de instellingen per ongeluk tijdens het dagelijks gebruik wijzigt.

Dit sprekend horloge is een onmisbaar hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. De tijd stellen wij voor u in, zodat u het horloge bij levering meteen kunt gebruiken. Het horloge wordt geleverd met een CR2025 batterij ([ook los verkrijgbaar!](#)) in een zwarte geschenkverpakking.

Klik [hier](#) voor de Nederlandse handleiding DianaTalks en [hier](#) voor de Nederlandse handleiding DianaTalks Touch.

Klik [hier](#) voor een instructie over het vervangen van de batterijen.

PRODUCTFOTO'S





Producteigenschappen

Extra Informatie	Doorsnede	Artikelnummer
Touch	33 mm	20174
Large	37 mm	20172
Royal	43 mm	20171