



## Druppelbril Origineel en Dex

- probleemloos uw ogen druppelen
- goedkoop en efficiënt
- nooit meer hulp nodig
- 2 varianten

De druppelbril van Druppelzorg® is een uitkomst voor mensen met oogklachten. Vaak kost het veel moeite om oogdruppels op de juiste manier, zonder te morsen, aan te brengen. Dit is erg problematisch en de hulpmiddelen die er zijn zijn vaak relatief duur of slechts geschikt voor één merk/soort oogdruppels.

Met de druppelbril zijn deze problemen voorgoed verleden tijd. De druppelbril is in twee varianten beschikbaar.

De **Originele druppelbril** (foto 1-3) bevat verschillende openingen, hierdoor passen veel gangbare maten flesjes en pompjes in de bril en blijven stevig vastzitten. Niet meer alle druppelflacons passen op de druppelbril, wat voorheen wel zo was. Zo wordt er bijvoorbeeld door een nieuwe richtlijn een nieuwe soort druppelflacon gebruikt na een staaroperatie. Daarvoor is de **Dex Druppelbril** (foto 4) ontworpen.

De druppelbrillen worden geleverd in een stoffen etui.

### **Gebruiksaanwijzing:**

1. Volg altijd de aanwijzingen van uw arts;
2. Was uw handen;
3. Plaats het doseerflesje of -flacon in een passende opening van de bril, zodat het stevig vastzit;
4. Zet de bril op;
5. Buig uw hoofd achterover, zodanig dat het doseerflesje verticaal boven uw oog zit;



6. Houd met een hand uw oog open;
7. Doseer met uw andere hand de druppels door in het flesje te knijpen;
8. Na gebruik uw bril afspoelen met water, alcohol of een desinfecterend middel en drogen met een schone doek.


**LET OP:** De bril is niet geschikt voor Minims pipetten. Door de lange hals kan de pipet in contact komen met uw oog.

**Bestel tip:** Wij geven u de tip om meer dan 1 druppelbril tegelijk te bestellen. Bijvoorbeeld voor de boven- en benedenverdieping, in uw tas of voor familie en bekenden. Voor deze prijs heeft u een hoop gebruiksgemak!

Klik [hier](#) voor een artikel van het AD over het succesverhaal van de druppelbril.

In verband met de hygiëne kunt u dit product niet retourneren.

## PRODUCTFOTO'S

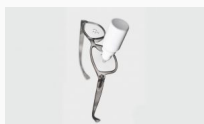

## Producteigenschappen

Artikelnummer	Naam	Extra Informatie
960000	Druppelbril Origineel	1 stuk
960000-2st	Druppelbril Origineel	2 stuks
960000-5st	Druppelbril Origineel	5 stuks
960001	Druppelbril Dex	1 stuk
960001-2st	Druppelbril Dex	2 stuks



Artikelnummer	Naam	Extra Informatie
960001-5st	Druppelbril Dex	5 stuks
960000+960001	Combi Druppelbril Origineel+Dex	2 x 1 stuk