

Colorino

De kleine broer van de Colortest



Inhoudsopgave

1: Inleiding	pagina	3
2: Apparaatbeschrijving:	pagina	3
3: Ingebruikneming	pagina	4
4: Kleurmeeting	pagina	4
5: Lichtdetector	pagina	4
6: Geluidsknop regelaar	pagina	5
7: Schoonmaken en onderhouden	pagina	5
8: Technische Data	pagina	5
9: Garantie en service	pagina	6
10: Wetgeving voor verwijdering	pagina	7
10.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur	pagina	7
10.2: Verwijderen van batterijen	pagina	7
11: Symbolen	pagina	8
12: Leverancier	pagina	8

1: Inleiding

Iris Huys bedankt u hartelijk voor de aankoop van dit product. Nadere inlichtingen over ons bedrijf vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.




Attentie: De Colorino mag niet in gebruik worden genomen voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen! Bewaar ze om later na te lezen en geef ze al naar behoefte samen met het toestel verder.

Voor blinden en visueel gehandicapten is een gebruiksaanwijzing op CD verkrijgbaar.

2: Apparaatbeschrijving:

Leg de Colorino zo voor u dat op de bovenzijde de licht verhoogde luidspreker van u weg wijst. Op de voorkant, in de buurt van de luidspreker, vindt u een ronde opening, dit is de meetkop van de Colorino.

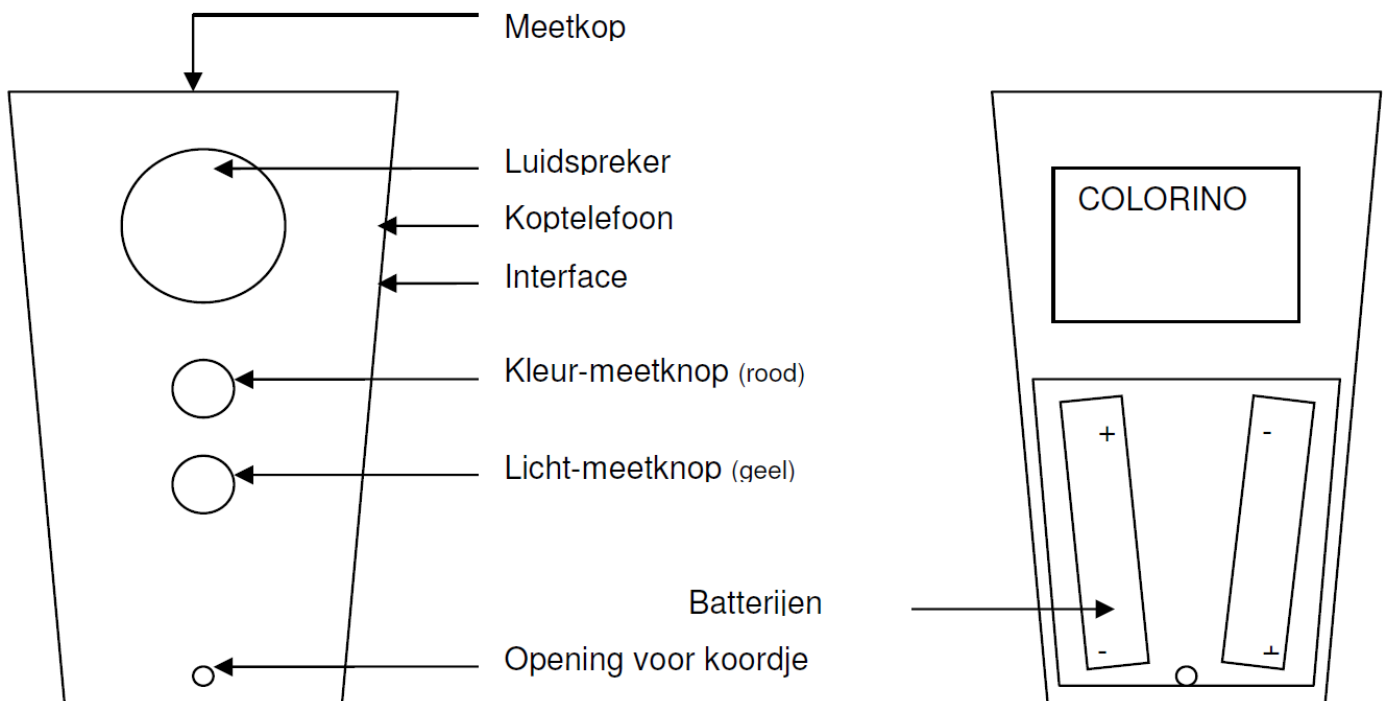

Op de bovenzijde van het apparaat bevinden zich twee ronde knoppen, waarmee u het apparaat kan bedienen. Aan de onderkant deze die naar u wijst vindt u een gleufje met een opening, waar u eventueel, een koordje kunt doortrekken, om het apparaat om de hals te dragen.

Op de rechter zijde vindt u twee openingen, de kleinste die het dichtst bij u is, dient voor het updaten van de Colorino software. De tweede grotere opening,

die het verst van u weg is, dient voor de aansluiting van de koptelefoon. Aan de onderkant bevindt zich het batterij vak.

Knop beschrijving:

- Kleur - meetknop (rode knop): De knop het dichtste bij de luidspreker is voor de kleurmeting.
- Licht - meetknop (gele knop): Deze onder de kleur meetknop, dient voor het vinden en herkennen van lichtbronnen en hun intensiteit.

3: Ingebruikneming

Voordat u de Colorino in gebruik neemt, moet u zeker zijn van de stroomvoorzorging. Open het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. Draai het apparaat zodat de smalle zijde van U weg wijst. Trek nu het kleine pinnetje naar u toe. Het deksel van het batterijvak gaat open en kan nu in zijn geheel weggenomen worden. Plaats nu de twee 1,5 volt AAA batterijen zo dat de min zijde, de vlakke zijde, van de batterij aan het voelbare verende aansluitpunt ligt. Sluit het batterijvak weer met het deksel en Uw Colorino is gebruiksklaar!

Om de batterijen eenvoudig uit het batterijvak te nemen drukt u op de contactplaats, aan de smalle zijde, van de batterijen en ze springen gemakkelijk uit het vakje.

4: Kleurmeting

Plaats de Colorino met de meetkop op het oppervlakte van de kleur die u wenst te meten. Druk nu kort op de (rode) kleur - meetknop en de kleur wordt in duidelijke taal uitgesproken. Wanneer u bij de meting de knop langer vasthoudt word de kleur steeds herhaald. Wordt de meetkop niet goed, dit wil zeggen, in een rechte hoek op de oppervlakte geplaatst, dan kan dit tot een foutmelding leiden. U hoort dan een signaaltoon.

5: Lichtdetector

Om een lichtbron te vinden houd u de gele licht - meetknop ingedrukt en beweeg dan de Colorino in de ruimte heen en weer, of in de richting van de vermoedelijke lichtbron (bv. het raam). Aan de hand van de gehoorde signaaltoon kunt u de betreffende lichtintensiteit vaststellen.

- Hoe hoger de signaaltoon hoe sterker de lichtbron.
- Hoe lager de signaaltoon hoe zwakker is de lichtbron.

6: Geluidsknop regelaar

De geluidsterkte kan op drie verschillende niveaus ingesteld worden. Om de geluidsterkte te veranderen, drukt u bij ingedrukte (gele) licht - meetknop op de (rode) kleur - meetknop, en zo stelt u de voor u gewenste geluidsterkte in. (deze regeling werk in een lus van zacht, midden, hard en weer zacht.)

7: Schoonmaken en onderhouden

Maak het oppervlak van het toestel met een lichtvochtig doekje schoon. Gebruik geen scherpe of schurende schoonmaakmiddelen.



Attentie: Er mag geen vocht in het toestel binnendringen! Voorkom in ieder geval scherpe of schurende schoonmaakmiddelen en schuur niet met harde voorwerpen (ook geen schoonmaakspons) an het oppervlak.

8: Technische Data

Kleurherkenning	Herkent meer dan 100 kleurnuances
Lichtherkenning	Meldt de lichtintensiteit in 10.000 verschillende tonen
Taaluitgave	Meer dan 20 verschillende talen in de hoogste kwaliteit
Geluidsterkte	Regelbaar in 3 verschillende niveaus (ook voor de koptelefoon (dia 3,5mm))
Afmetingen	110 x (39-50) x 21,25mm
Gewicht	85gr inclusief batterijen
Voeding	2 alkaline batterijen 1,5V type AAA
Details	Eigen interface voor het updaten van de software Mogelijkheid om apparaat om de hals te dragen Stoftasje

9: Garantie en service


Wij geven vanaf rekeningsdatum:

- 24 maand garantie op het toestel
- 12 maand op toebehoor (b.v. netvoeding, koptelefoon etc.)
- 6 maand op slijtagedelen (b.v. accu's, manchetten, deksel van het omhulsel etc.)
- Voor externe opslagmedia (CD's of geheugenkaart) kunnen wij geen garantie geven.


Het toestel wordt in het geval van garantie door de producent gratis gerepareerd of, zo nodig, door een nieuw toestel vervangen. Bij ondeskundig gebruik, zoals bijvoorbeeld induiken in vocht, laten vallen of ingrepen in het toestel, raakt de garantie in verval. Om te reclameeren of te laten repareren neem met ons of met de winkel contact op, waar u het toestel hebt gekocht. Neem eerst contact op met de producent, voordat u het toestel opstuurt. U krijgt dan spoedig alle nodige informatie, om het probleem correct en efficiënt op te lossen. Denk eraan, dat het toestel enkel van deskundigen mag worden geopend. De producent behoudt zich het recht voor technische veranderingen en verbeteringen ook zonder vooraankondiging te allen tijde door te voeren.

10: Wetgeving voor verwijdering

10.1: Verwijderen van gebruikte elektronische apparatuur





	<p>Dit product is niet te behandelen als gewone huisafval, maar moet bij een verzamelplaats voor recycling van elektrisch en elektronisch apparatuur worden verwijderd. Voor verdere informatie vraag uw gemeente, de gemeentelijke overheid voor afvalverwerking of in de zaak, waar u dit product hebt gekocht.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.2: Verwijderen van batterijen

	<p>Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het gewone huisafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen terug te geven. U kunt uw oude batterijen bij openbare verzamelplaatsen in uw gemeente afgeven of overal, waar hetzelfde soort batterijen te koop is.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pb-Cd-Hg Deze tekens vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb betekend bevat lood/CD betekend bevat cadmium/Hg betekend bevat kwikzilver

11: Symbolen

	Let op de gebruiksaanwijzing
	Let op extra informatie
	Niet als gewoon huisvuil verwijderen
	Informatie leverancier

12: Leverancier

	Dit product wordt geleverd door Iris Huys Meridiaan 40 2801 DA Gouda Telefoonnummer: 0182-52 58 89 E-mail: info@irishuys.nl Website: www.irishuys.nl
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------