

Handleiding Iris sprekend horloge



Het Iris horloge is een analoog, sprekend en radio-gestuurde horloge. Het horloge is ontworpen om de tijd automatisch en uiterst nauwkeurig in te stellen. Dit gebeurt via het DCF77-radiosignaal dat wordt uitgezonden door een atoomklok in Duitsland. Dankzij deze technologie hoeft u zich geen zorgen te maken over het handmatig instellen van de tijd of het aanpassen aan zomer- en wintertijd.

Het horloge synchroniseert doorgaans elke nacht rond 3 uur, wanneer het signaal het best te ontvangen is. Voor optimale werking wordt aangeraden het horloge nabij een raam of op een open plek te plaatsen.

Indien gewenst, kunt u de tijd ook handmatig instellen. In dat geval blijft het horloge op de door u gekozen tijd staan, zonder automatische aanpassing.

Inhoud

1. Slaapmodus	3
2. Knoppen functies:.....	3
3. Signaalontvangst van het Iris sprekende horloge	4
3.1 Metalen behuizing met metalen horlogeband.....	4
3.2 Correcte posities voor signaal ontvangst.....	4
3.3 Handmatige signaalontvangst:	4
4. Dagelijks alarm zetten:	5
4.1 Opmerkingen:	5
4.2 Alarm aan/uit:	5
5. Urenaankondiging (geluidsignaal) aan/uit	6
6. Handmatig tijd verzetten (voor landen zonder tijdsignaal).....	6
7. Datum instellen.....	7
8. Probleemoplossingen.....	7
8.1 Wijzers resetten	8
8.2 Horloge stilstand op 12 uur en geen spraakfunctie	8
8.3 Horloge ontvangt geen signaal	8
8.4 Batterijduur en vervanging	8
8.5 Na batterijvervanging	9

1. Slaapmodus

Als u het horloge voor het eerst ontvangt en de wijzers staan op 1 uur, dan betekent dit dat het horloge op slaapmodus staat.

Houd de 2 uur-, en de 4 uursknop tegelijkertijd ingedrukt voor 3 seconden om naar het normale display te gaan.

(Gebruik nooit de kroonknop om de wijzers aan te passen!)



2. Knoppen functies:

2 uursknop

- Druk de 2 uursknop eenmaal in om het uur en de minuten uit te laten spreken.
- Druk de 2 uursknop tweemaal in om de datum uit te laten spreken.
- Druk de 2 uursknop driemaal in om de ontvangst status uit te laten spreken. Als de ontvangst succesvol is, zal het horloge "update van de tijd" zeggen. Als de ontvangst mislukt is, zal het horloge "geen update van de tijd" zeggen.

4 uursknop functies:

- Druk de 4 uursknop eenmaal in om de alarm instellingen te controleren en om te kijken of alarm AAN of UIT staat. Het horloge zal eerst de alarm-tijd zeggen en daarna of het horloge AAN of UIT staat.

Kroon:

- Gebruik de kroon om de wijzers in de 12 uurspositie te zetten. Als de kroon uitgetrokken is stopt het horloge direct.

3. Signaalontvangst van het Iris sprekende horloge

Uw horloge zal gepositioneerd moeten worden in de hieronder beschreven positie om het radiosignaal op te kunnen pakken. Plaats deze bij een raam tijdens een signaal ontvangst om te zorgen voor optimale resultaten.

3.1 Metalen behuizing met metalen horlogeband

- Laat de metalen horlogeband de achterkant van de behuizing niet aanraken, dit zal de ontvangst van het signaal negatief beïnvloeden. U kunt het horloge om het kussentje uit de verpakking doen of een ander voorwerp tussen de horlogeband en de achterkant van de behuizing plaatsen.
- Leg het horloge nooit op de zijkant, want in die positie is het niet mogelijk een signaal te ontvangen.

3.2 Correcte posities voor signaal ontvangst

Voor een horloge met een metalen horlogeband en behuizing, moet de horlogeband weg van de behuizing zijn, zoals hieronder getoond. Stop bijvoorbeeld een lucifersdoosje tussen de rug van de behuizing en het metalen bandje anders zal dit het signaal beïnvloeden.

3.3 Handmatige signaalontvangst:

Voor handmatige signaalontvangst moet u het horloge op een tafel naast een raam leggen. Let op dat u het horloge goed neerlegt zoals hierboven aangegeven.

Terwijl het horloge in de normale modus staat:

1. Houd de 2 uursknop in totdat de secondewijzer stil staat.
2. Het horloge heeft 5 tot 8 minuten nodig om een signaal te ontvangen. Wacht tot het horloge het signaal heeft ontvangen.
3. Nadat het signaal ontvangen is zal het horloge de tijd weer aangeven, nadat de minutenwijzer zich aangepast heeft.
4. Druk de 2 uursknop 3 keer in nadat het horloge in de normale modus staat om de ontvangststatus te controleren.
 - Als de ontvangst succesvol is, zal het horloge “update van de tijd” zeggen.
 - Als de ontvangst mislukt is, zal het horloge “geen update van de tijd” zeggen.

4. Dagelijks alarm zetten:

1. Houd de 4 uursknop tenminste 3 seconden ingedrukt, totdat het horloge “om het alarm in te stellen, drup op de 2 uursknop” zegt.
2. Druk de 2 uursknop in. Het horloge zal “druk de 2 uursknop in de uren in te stellen en de 4 uursknop om te bevestigen” zeggen.
3. Druk op de 2 uursknop om de uren in te stellen en druk daarna op de 4 uursknop om te bevestigen.
4. Nadat het uur bevestigd is, zal het horloge “druk de 2 uursknop in om de minuten in te stellen en de 4 uursknop om te bevestigen” zeggen.
5. Druk op de 2 uursknop in om de minuten in te stellen en druk op de 4 uursknop om te bevestigen en af te sluiten.
6. Na bevestiging zal het horloge de tijd (uur en minuut) van de gezette wekker zeggen.
7. Om het alarm te controleren, druk de 4 uursknop eenmaal in terwijl het horloge normaal loopt.

4.1 Opmerkingen:

- Het alarm gaat 30 seconden lang af. Eén druk op één van de knoppen zet het alarm uit.
- Het alarm is een dagelijks alarm, dus zelfs als u het uitgezet heeft, zal het de volgende dag weer afgaan. Als u het dagelijkse alarm wilt uitschakelen, kunt u het stappenplan hieronder volgen.
- Elke keer dat het alarm na 30 seconden stopt zal het horloge de alarm tijd zeggen.

4.2 Alarm aan/uit:

1. Druk de 4 uursknop tenminste 3 seconden in (terwijl het horloge in normale stand staat), totdat het horloge “zet wekker, druk de 2 uursknop in om de wekker te zetten” zegt.
2. Druk de 4 uursknop nog een keer in, het horloge zegt: “Alarm AAN/UIT, druk de 2 uursknop in om te selecteren”.
3. Druk de 2 uursknop in, het horloge zegt: “druk de 2 uursknop in naar AAN/UIT, gebruik de 4 uursknop om te bevestigen”.
4. Elke druk op de 2 uursknop wisselt tussen aan/uit, het horloge zegt: “wekker AAN” als de wekker aan staat en “wekker UIT” als de wekker uitstaat.
5. Druk de 4 uursknop in om te bevestigen en af te sluiten.

5. Urenaankondiging (geluidsignaal) aan/uit

Wanneer het geluidsignaal aan is, zal het horloge elk uur van 6 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds het "uur" aankondigen.

1. Houd de 4 uursknop ongeveer 3 seconden ingedrukt (terwijl het horloge in de normale stand staat), totdat het horloge "zet wekker", gebruik de 2 uursknop om te bevestigen" zegt.
2. Druk de 4 uursknop tweemaal in, het horloge zegt: "geluidsignaal aan/uit", gebruik de 2 uursknop om te bevestigen.
3. Druk de 2 uursknop in het horloge zegt: "druk de 2 uursknop naar aan/uit", gebruik de 4 uursknop om te bevestigen.
4. Elke druk op de 2 uursknop wisselt het geluidsignaal van "aan" naar "uit". Het horloge zegt: "geluidsignaal aan" wanneer het aangezet wordt, of "geluidsignaal uit" wanneer het uitgezet wordt.
5. Druk de 4 uursknop in om te bevestigen en af te sluiten.

6. Handmatig tijd verzetten (voor landen zonder tijdsignaal)

Gebruik deze functie alleen wanneer u reist of leeft in een land zonder tijdsignaal. Als u terugkomt uit een land zonder tijdsignaal, moet u eerst het horloge weer naar de lokale tijd zetten. Anders kan uw horloge geen signalen ontvangen, omdat er altijd een tijdsverschil is tussen landen met en zonder tijdsignaal.

1. Houd de 4 uursknop ingedrukt voor tenminste 3 seconden (terwijl het horloge in de normale stand staat). Na 3 seconden zal het horloge "zet wekker, druk de 2 uursknop in om in te stellen" zeggen.
2. Druk daarna de 4 uursknop nog drie keer in, het horloge zegt: "stel tijd in, druk de 2 uursknop om in te stellen".
3. Druk de 2 uursknop in, het horloge zegt: "druk de 2 uursknop in om de uren in te stellen, gebruik de 4 uursknop om te bevestigen".
4. Nadat het uur bevestigd is, zegt het horloge: "druk de 2 uursknop in om de minuten in te stellen en de 4 uursknop om te bevestigen".
5. Nadat alles bevestigd is, zegt het horloge de nieuwe tijd en de wijzers zullen naar de gezette tijd gaan. Wacht tot het horloge normaal loopt.

7. Datum instellen

Gebruik deze functie alleen wanneer u reist of leeft in een land zonder tijdsignaal. Als u terugkomt uit een land zonder tijdsignaal, moet u eerst het horloge weer naar de lokale tijd zetten. Anders kan uw horloge geen signalen ontvangen, omdat er altijd een tijdsverschil is tussen landen met en zonder tijdsignaal.

6. Houd de 4 uursknop ingedrukt voor tenminste 3 seconden (terwijl het horloge in de normale stand staat). Na 3 seconden zal het horloge “zet wekker, druk de 2 uursknop in om in te stellen” zeggen.
7. Druk daarna de 4 uursknop nog drie keer in, het horloge zegt: “stel tijd in, druk de 2 uursknop om in te stellen”.
8. Druk de 2 uursknop in, het horloge zegt: “druk de 2 uursknop in om de uren in te stellen, gebruik de 4 uursknop om te bevestigen”.
9. Nadat het uur bevestigd is, zegt het horloge: “druk de 2 uursknop in om de minuten in te stellen en de 4 uursknop om te bevestigen”.
10. Nadat alles bevestigd is, zegt het horloge de nieuwe tijd en de wijzers zullen naar de gezette tijd gaan. Wacht tot het horloge normaal loopt.
1. Houd de 4 uursknop tenminste 3 seconden ingedrukt terwijl het horloge normaal loopt, het horloge zegt: “zet wekker, druk de 2 uursknop in”.
2. Druk de 4 uursknop nog 4 keer in het horloge zal “stel datum in, druk de 2 uursknop in om in te stellen” zeggen.
3. Druk de 2 uursknop in, het horloge zegt: “druk de 2 uursknop in om het jaar in te stellen, en de 4 uursknop om te bevestigen.
4. Nadat het jaar bevestigd is, zal het horloge “druk de 2 uursknop in om de maand in te stellen, en de 4 uursknop om te bevestigen”.
5. Nadat de maand bevestigd is, zal het horloge “druk de 2 uursknop in om de dag in te stellen en de 4 uursknop om te bevestigen”.
6. Nadat de dag bevestigd is, zal het horloge de ingestelde datum uitspreken.

8. Probleemoplossingen

Uw horloge is een heel precies en gevoelig voorwerp. In zeldzame gevallen kan een harde stoot of trillingen ervoor zorgen dat de wijzers onregelmatig lopen, waardoor het horloge de verkeerde tijd aangeeft, maar de interne klok nog wel goed staat. U kunt dit merken als de wijzers niet overeenkomen met de tijd die uitgesproken wordt. In dat geval kunt u het horloge handmatig bijstellen door de volgende instructies op te volgen.

8.1 Wijzers resetten

1. Wacht tot de secondewijzer op 12 uur staat en trek dan de kroon uit, zodat de secondewijzer stilstaat op 12 uur.
2. Draai de kroon, totdat ook de uur- en de minutenwijzer op 12 uur staan.
3. Als alle wijzers op 12 uur staan, drukt u de 2 uursknop 3 seconden lang in, daarna drukt u de kroon weer naar beneden.
4. De wijzers zullen zich gelijkstellen aan de interne tijd en vervolgens weer goed lopen.

8.2 Horloge stilstand op 12 uur en geen spraakfunctie

Als de batterij bijna leeg is, zullen de wijzers stoppen en de spraakfunctie uitgezet worden. Als dit gebeurt, is het tijd om de batterij te vervangen.

8.3 Horloge ontvangt geen signaal

Redenen dat het horloge het signaal niet kan ontvangen zijn:

- Buiten Nederland zijn
- In ontwikkelingsgebied zijn
- Metalen objecten die het radiosignaal blokkeren
- Storing door TV of radio
- Zorg ervoor dat het horloge bij een raam ligt, omdat dit de beste ontvangst geeft. Als uw horloge geen ontvangst kan maken met het radiosignaal, functioneert het als een normaal horloge, de tijd zal dan gecorrigeerd worden bij de volgende signaal ontvangst.

8.4 Batterijduur en vervanging

Als er vastgesteld wordt dat de batterij bijna leeg is zullen de wijzers langzaam gaan lopen totdat ze op 12 uur staan, ook stopt de spraakfunctie, dan is het tijd om de batterij te vervangen.

Aanvragen per dag	Verwachte batterijduur
0	1,5 jaar
5	1 jaar
10	8 maanden
15	6 maanden
20	5 maanden
25	4 maanden

8.5 Na batterijvervanging

1. Als u de batterij heeft vervangen en de wijzers lopen niet, houd dan de 2 uursknop ingedrukt voor ongeveer 2 seconden, de secondewijzer gaat dan lopen. Als de secondewijzer op 12 uur staat trek dan de kroon uit.
2. Draai de kroon totdat de wijzers op de 12 uurspositie staan.
3. Druk de 2 uursknop in en houd deze ingedrukt voor ongeveer 2 seconden tot de bevestigingstoon klinkt.
4. Druk dan de kroon weer naar binnen.
5. Vervolgens kunt u dan het signaal handmatig ontvangen (volg het handmatige ontvangst stappenplan); of plaats het horloge bij een raam om het signaal om drie uur 's nachts op te vangen. Als dat niet lukt, blijft het horloge het de volgende 24 uur proberen. Als dit gelukt is, zullen de wijzers de juiste tijd aangeven.

Opmerking:

Trek de kroon nooit uit als het horloge normaal loopt, anders zullen de wijzers niet langer synchroon lopen met de spreektijd.

Meer informatie:



Iris Huys

Meridiaan 40

2801 DA Gouda

Telefoon: 0182-52 58 89

E-mail: info@irishuys.nl

Website: www.irishuys.nl