

Handleiding

PennyTalks (PT)
Uw persoonlijke digitale labellezer
met spraakuitvoer en realtime
back-up.

Korte uitleg:


Plaats een zelfklevend label op elk object dat u wilt kunnen herkennen.

Houd de sensor bij het label en neem een spraakbericht op voor dat label.


Wanneer u de sensor weer bij het label houdt, wordt uw spraakbericht afgespeeld. Zo kunt u elk object markeren en herkennen.

1

Voorkant

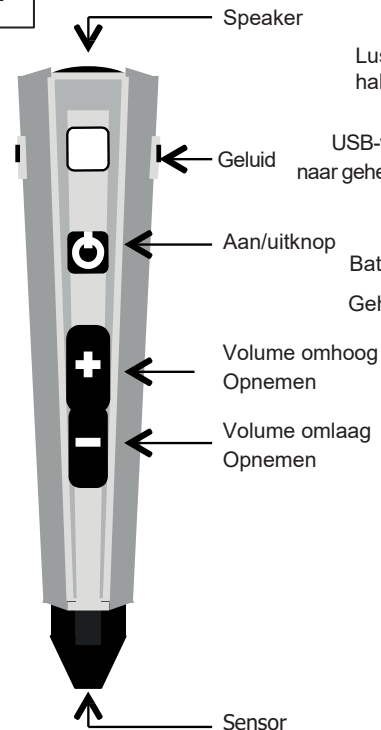


Achterkant

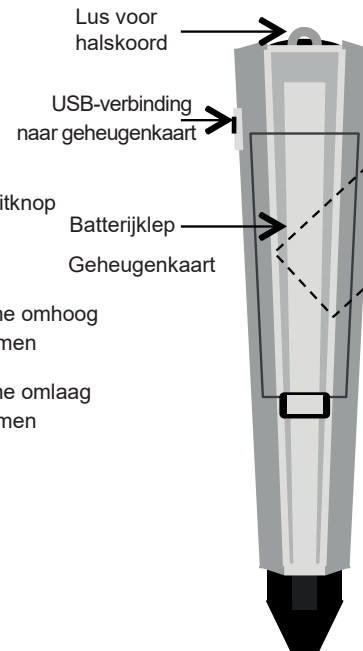

2

Geheugenkaart zit onder de batterijen

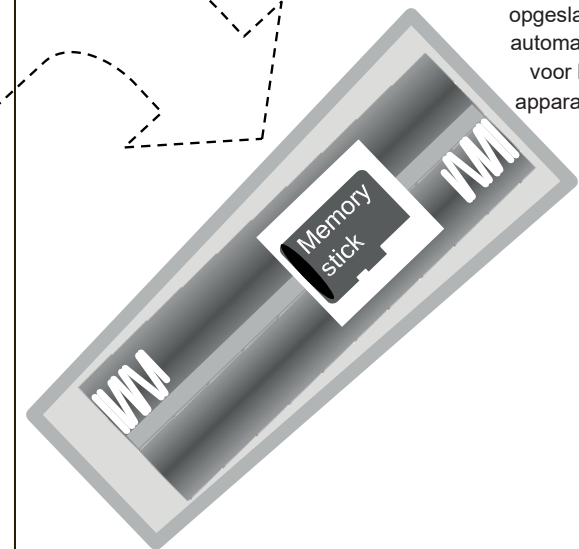

PT beschikt over een uitneembare geheugenkaart waar al uw opgenomen spraakberichten worden opgeslagen. Dit is een automatische back-up voor het geval het apparaat beschadigd raakt.

3

Het instellen van de taal voor de gesproken gebruiksaanwijzingen

PennyTalks beschikt over spraakuitvoer in 12 verschillende talen, waarmee de gebruiksaanwijzingen worden uitgesproken.

Er is ook een ondersteunende functie met belseinhaal beschikbaar.

1. Druk op de Aan/uitknop en houd deze 3 seconden ingedrukt.
2. Raak met de sensor een van de beschikbare talen aan op de bijgeleverde lijst met talen.
3. PT geeft aan welke taal u hebt aangeraakt, die vanaf nu de ingestelde taal is.

Volume:

Druk op de + of - knop om het volume te verhogen of verlagen.

4

Aanzetten/uitzetten:

Plaats de batterijen in de PT. Druk 3 seconden lang op de Aan/uitknop. Het apparaat spreekt vervolgens uit of het aan of uit staat.

Als de PT langer dan 60 seconden niet is gebruikt, schakelt het apparaat zichzelf uit.

Opnemen van een spraakbericht:

1. Raak een label aan met de sensor tot de PT zegt: 'Dit is een nieuw label'.
2. Druk op de + of - knop totdat de PT zegt: 'Start met opnemen'.
3. Houd de knop ingedrukt en neem uw bericht op.
4. Als u klaar bent met opnemen, kunt u de knop loslaten.
5. Uw spraakbericht is nu opgeslagen en PT zegt nu: 'Opnemen afgelopen'.

5

Afspelen:

Houd de sensor bij het label. De PT speelt nu uw opgenomen spraakbericht af.

Verwijderen van een opgeslagen label:

1. Raak het label aan met de sensor
2. PT speelt nu uw opname af
3. Druk op zowel de + als de - knop, totdat de PT zegt: 'Verwijderd'.

Het label kan nu opnieuw ingesteld worden met een nieuw spraakbericht.

Bijgeleverd in de doos:

Alkaline batterijen (niet oplaadbaar)
USB-kabel
Halskoord
Hoofdteléfono
Zelfklevende, voelbare labels
Zachte zelfklevende labels voor kleding. Veilig om te wassen en te drogen in de wasdroger.
Lijst met beschikbare talen

Technische specificaties:

Batterijen: Type AAA max 1.5 V
USB-verbinding
Standaard geheugencapaciteit: tot 2700 opnames
Optionele geheugencapaciteit: tot 90.000 opnames