



BlindShell

Classic 2

1	BlindShell Classic 2 Gebruikershandleiding	3
2	Aan de slag	4
2.1	Verpakkingsinhoud	4
2.2	Telefoonbeschrijving	4
2.3	De achterkant verwijderen	5
2.4	SIM-kaart, SD-geheugenkaart en batterij plaatsen	5
2.5	Opladen	7
2.6	De telefoon aanzetten	7
3	Bediening van de telefoon	8
3.1	Volume	8
3.2	Navigatie	8
3.3	Actie-toetsen	10
3.4	Numeriek toetsenbord	10
3.5	Tekstinvoer	11
3.6	Spraakbesturing	12
3.7	SOS-knop	12
3.8	Extern toetsenbord	12
3.9	Bestandsoverdracht van PC naar BlindShell	13
4	BlindShell functies	15
4.1	Hoofdscherm	15
4.2	Oproepen	15
4.3	Berichten	18
4.4	Contactpersonen	20
4.5	Toepassingen	22
4.6	Instellingen	40
4.7	Handleiding	51
4.8	Schakel de telefoon uit	52
4.9	Gemiste meldingen en informatie over telefoonstatus	52
4.10	Favoriete applicaties	52
5	Technische gegevens	53
5.1	Connectiviteit	53
5.2	Hardware	53
5.3	Sensors	53
5.4	Certificeringen	54
6	Regelmatig gebruik en veiligheidsinformatie	55
7	Regelgevende informatie	59
8	Juridische informatie	61

1 BlindShell Classic 2 Gebruikershandleiding

BlindShell Classic 2 is een toetstelefoon voor blinden en slechtzienden. De telefoon wordt bediend via het fysieke toetsenbord of door middel van spraakcommando's. Feedback wordt gegeven aan de hand van de geïntegreerde kunstmatige stem, trillingen en bijkomende akoestische signalen.

Belangrijk aandachtspunt: Als u de batterij van uw telefoon volledig laat ontladen, kan het erop lijken dat de telefoon helemaal niet meer kan worden opgeladen. Laat in een dergelijk geval de telefoon enkele uren aan de lader liggen. Daarna zou de telefoon weer moeten gaan opladen. Als u een lege batterij gedurende langere tijd in de telefoon laat zitten, kan dit leiden tot beschadiging van de batterij. Een dergelijk geval valt niet onder de garantie van de telefoon. Wij raden u aan de batterij uit het toestel te verwijderen als u de telefoon langer dan een week niet gebruikt.

2 Aan de slag

2.1 Verpakkingsinhoud

- BlindShell Classic 2 telefoon.
- Batterij - een plat rechthoekig voorwerp.
- Koptelefoon - aan het ene uiteinde van de koptelefoon zit een 3,5MM-connector (stekker), aan het andere uiteinde zitten twee oordopjes.
- USB-wandlader - standaard USB-lader, ingang 100V~240V AC, 50/60Hz, uitgang 4,7V-5,3V DC 0-2A.
- USB-kabel - een USB Type-C kabel, met standaard mannelijke USB Type-A aan het andere uiteinde.
- Oplaadstation - een houder voor het opladen van de telefoon. Met de meegeleverde zelfklevende pad schuift het oplaadstation niet weg.
- NFC-tag (3x) - een sticker voor het taggen van voorwerpen. Deze tags kunnen worden gelezen door een telefoontoepassing.
- Telefoonkoord - een koord dat aan de telefoon kan worden bevestigd. Met het meegeleverde haakje kunt u het lusje door het gaatje halen.

2.2 Telefoonbeschrijving

Voorkant van de telefoon

Aan de voorkant van de telefoon bevinden zich de volgende onderdelen. Vermeld in de volgorde waarin zij van boven naar beneden op de telefoon zijn aangebracht.

- Oorstukje - lijnvormig uitsteeksel dat wordt gebruikt als luidspreker tijdens een telefoongesprek.
- LCD-scherm - het gladde gedeelte van de telefoon voor het weergeven van informatie.
- Toetsenbord - toetsen voor het bedienen van de telefoon en het invoeren van tekst.
- Microfoon - bevindt zich tussen de toetsen van het toetsenbord. Voor spraakinvoer.
- Luidspreker - lijnvormige inkeping voor spraak- en geluidswaergave.

Achterkant van de telefoon

De achterkant van de telefoon bestaat uit de volgende onderdelen. Ze bevinden zich allemaal in het bovenste gedeelte van de achterkant.

- Camera - gemarkeerd door een voelbare rand. Voor het maken van foto's in telefoontoepassingen.
- Camera LED zaklamp - de rondvormige uitsparing naast de camera. Ondersteunt de camera bij weinig licht.
- SOS-knop - de rondvormige toets onder de camera. Door het indrukken van deze toets wordt bij noodgevallen een toegewezen contactpersoon gebeld.

Randen van de telefoon

Op de bovenrand bevinden zich:

- Koptelefoonaansluiting.
- LED zaklamp.

Op de onderrand bevinden zich van links naar rechts:

- Gaatje voor het lusje.
- USB Type-C-aansluiting - voor het opladen van de telefoon en het aansluiten van de telefoon op een computer.
- Openings sleuf - om de achterkant van de telefoon af te nemen.

Aan de linkerzijrand bevinden zich volumeknoppen waarmee het volume van de spraak- en audio-uitvoer kan worden geregeld.

Aan de rechterzijrand bevindt zich een actieknop waarmee de lijst met favoriete toepassingen kan worden geopend en spraakbesturing kan worden opgeroepen.

2.3 De achterkant verwijderen

Om de achterkant van de telefoon te verwijderen, steekt u uw vingernagel in de gleuf aan de rechteronderkant van de telefoon. Verwijder vervolgens de achterkant van het toestel. Zorg ervoor dat bij het terugplaatsen alle randen op de telefoon aansluiten.

2.4 SIM-kaart, SD-geheugenkaart en batterij plaatsen

Als u een SIM-kaart, SD-geheugenkaart of batterij wilt plaatsen, verwijdert u eerst de achterkant. Wanneer de achterkant is verwijderd, ziet u het batterijcompartiment, een rechthoekige holle ruimte in de telefoon. Hierin bevinden zich ook de kaartsleuven.

SIM-kaarten plaatsen

De telefoon heeft twee micro-simkaartsleuven in het bovenste deel van het batterijcompartiment. Daarnaast, aan de rechterkant, bevindt zich een sleuf voor een SD-geheugenkaart. Zorg er bij het plaatsen van een SIM-kaart voor dat de kaartcontacten naar beneden gericht zijn en de afgeschuinde rand zich in de linkerbovenhoek bevindt. Schuif de kaart vervolgens in de sleuf.

Een SIM kaart verwijderen

Om een SIM-kaart uit een sleuf te verwijderen, plaatst u uw vingertop op de rand van de SIM-kaart, duwt u vervolgens op en schuift de SIM-kaart met uw vinger uit de SIM-kaartsleuf.

Een SD-geheugenkaart plaatsen

De SD-geheugenkaartsleuf is de rechtersleuf in het bovenste gedeelte van het batterijcompartiment. Zorg er bij het plaatsen van een SD-geheugenkaart voor dat de kaartcontacten naar beneden gericht zijn en schuift de kaart vervolgens in de sleuf. Duwt de kaart er zachtjes in. Een klikgeluid geeft aan dat de kaart vastzit in de sleuf.

Een SD-geheugenkaart verwijderen

Om een SD-geheugenkaart te verwijderen, duwt u de kaart zover in de sleuf totdat het klikgeluid aangeeft dat de kaart wordt vrijgegeven. Schuift de kaart vervolgens uit de sleuf.

De batterij plaatsen

Om de batterij te plaatsen, zoekt u het uitsteeksel op de rand van de batterij. Dit uitsteeksel moet naar de bovenste hoek van het batterijcompartiment wijzen. Schuift de batterij van boven naar beneden in het compartiment en zorgt dat de batterij er goed in zit.

De batterij verwijderen

Om de batterij te verwijderen, maakt u gebruik van een gleuf in de rechterbovenhoek van het batterijcompartiment. Trekt de batterij omhoog.

2.5 Opladen

De telefoon kan worden opgeladen via een USB-kabel of het oplaadstation. Als u het oplaadstation wilt gebruiken, sluit u de USB Type-C-kabel aan op de aansluiting aan de achterkant van de houder. Plaats de telefoon in de houder. De USB-aansluiting van de telefoon moet naar beneden gericht zijn. De achterkant van de telefoon moet tegen de houder rusten.

2.6 De telefoon aanzetten

De telefoon zet u aan door de terug-toets langer ingedrukt te houden. De telefoon zal een opstartmelodie afspelen. De telefoon is klaar wanneer deze begint te spreken. Registratie bij het mobiele netwerk kan tot een minuut duren nadat de telefoon is ingeschakeld.

3 Bediening van de telefoon

3.1 Volume

De volumeknoppen bevinden zich aan de linkerzijrand van de telefoon. Met de volume-omhoog knop verhoogt u het bestaande volume van de spraak- of audio-uitvoer. Met de volume-omlaag knop verlaagt u het volume.

3.2 Navigatie

De navigatietoetsen bevinden zich in het bovenste gedeelte van het toetsenbord. Ze worden gebruikt om door telefoonmenu's en optielijst te navigeren.

Door het menu of de menu-optielijst bladeren

De menu's of menu-optielijsten zijn circulaire lijsten. Als u de laatste menu-optie bereikt en naar het volgende item gaat, springt u weer naar de eerste menu-optie van de lijst. En vice-versa, als u bij de eerste menu-optie bent en naar de vorige menu-optie gaat, springt u naar de laatste menu-optie van de lijst. Een pieptoon laat weten als u bij de eerste of laatste menu-optie bent. Navigatie door een menu of menu-optielijst gaat als volgt:

- Om naar de volgende menu-optie te gaan, drukt u op de omlaag-toets.
- Om naar de vorige menu-optie te gaan, drukt u op de omhoog-toets.
- Om een menu-optie te openen of de menu-optie te selecteren, drukt u op de bevestigingstoets.
- Om het huidige menu of de menu-optielijst te verlaten, drukt u op de terug-toets.

Tip: Door de omhoog-toets langer ingedrukt te houden, springt u naar de eerste menu-optie. Om naar de laatste menu-optie te springen, houdt u de omlaag-toets langer ingedrukt. Het is mogelijk om naar een specifieke positie in het menu te springen door de betreffende cijfers op het toetsenbord in te drukken. Meerdere cijfers zijn toegestaan.

Zoekfunctie

De lange menu-optielijsten kunnen een zoekfunctie hebben als de laatste menu-optie van de lijst. Deze kan snel worden opgeroepen door op de omhoog-toets te drukken terwijl u zich op het eerste item van de lijst bevindt.

Omlaag-toets

De omlaag-toets is de lijnvormige toets in het midden van de tweede toetsenrij. Door de omlaag-toets in te drukken kunt u:

- Naar de volgende menu-optie gaan.
- Tijdens het opstellen van een bericht of andere tekstinvoer naar het volgende teken gaan.
- Het hoofdmenu openen als u op het hoofdscherm bent.

Omhoog-toets

De omhoog-toets is de lijnvormige toets in het midden van de eerste toetsenrij. Door de omhoog-toets in te drukken kunt u:

- Naar de vorige menu-optie gaan.
- Tijdens het opstellen van een bericht of andere tekstinvoer naar het vorige teken gaan.
- Het hoofdmenu openen als u op het hoofdscherm bent.

Bevestigingstoets

De bevestigingstoets is de grote groene puntvormige knop aan de linkerkant van de tweede toetsenrij. Door de bevestigingstoets in te drukken kunt u:

- Een menu-optie openen, een lijstoptie selecteren, acties bevestigen of oproepen accepteren.
- Het hoofdmenu openen als u op het hoofdscherm bent.

Terug-toets

De terug-toets is de rode schuine knop aan de rechterkant van de tweede toetsenrij. Door de terug-toets in te drukken kunt u:

- Teruggaan in een menu, acties annuleren, gesprekken weigeren of ophangen.
- Tijdens het opstellen van een bericht of andere tekstinvoer het vorige teken wissen. Houd de terug-toets langer ingedrukt om de gehele tekst te wissen.
- Op andere posities de terug-toets langer ingedrukt houden om terug te keren naar het hoofdscherm.

3.3 Actie-toetsen

Actie-toetsen activeren overal op de telefoon dezelfde specifieke actie.

Linker actie-toets

De linker actie-toets is de puntvormige knop aan de linkerkant van de eerste toetsenrij. Druk hierop om informatie weer te geven over de status van de telefoon, zoals tijd en datum, batterijniveau, netwerkinformatie of gemiste meldingen.

Rechter actie-toets

De rechter actie-toets is de puntvormige knop aan de rechterkant van de eerste toetsenrij. Druk hierop om de laatste uiting te herhalen. Houd de toets langer ingedrukt om de laatste uiting te spellen.

Actieknop aan de zijkant

De actieknop aan de zijkant is de langwerpige knop aan de rechterzijrand van de telefoon. De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:

- Druk op de knop om de lijst van uw favoriete toepassingen te openen.
- Houd langer ingedrukt om spraakbesturing op te roepen.
- Houd tijdens het schrijven van een bericht of andere tekstinvoer de knop langer ingedrukt om spraakdicteren van de tekst op te roepen.

3.4 Numeriek toetsenbord

Het numerieke toetsenbord bestaat uit vier rijen convexe toetsen. De eerste rij bevat de toetsen één, twee en drie. De tweede rij bevat de toetsen vier, vijf en zes. De derde rij bevat de toetsen zeven, acht en negen. De laatste, vierde rij, bevat de toetsen asterisk (sterretje), nul, en hekje (getalteken).

Asterisk-toets

De asterisk-toets is de linker-toets in de onderste rij van het numerieke toetsenbord. Houd de asterisk-toets langer ingedrukt om de telefoon te vergrendelen. Om de telefoon te ontgrendelen, houd u nogmaals de asterisk-toets langer ingedrukt. Deze functie kan worden uitgeschakeld onder Instellingen.

Hekjes-toets

De hekjes-toets is de rechter-toets in de onderste rij van het numerieke toetsenbord. Houd deze langer ingedrukt om het menu geluidsprofielopties te openen (stil, trillen, luid, vliegtuigmodus).

3.5 Tekstinvoer

Tekstinvoer via numeriek toetsenbord

Tijdens het opstellen van een bericht of andere tekstinvoer gebruikt u het numerieke toetsenbord voor het invoeren van tekst, cijfers en speciale tekens. Elke toets, behalve de hekjes-toets, bevat een groep tekens. U kunt door de groep tekens bladeren door meerdere keren op de betreffende toets te drukken.

Bijvoorbeeld toets twee bevat de letters A, B, C, en het cijfer 2. Om de letter B in te voeren - drukt u tweemaal op de toets. Om het cijfer 2 in te voeren - drukt u vier keer op de toets of houdt u de toets langer ingedrukt.

- Toets één bevat speciale interpunctie tekens.
- De asterisktoets bevat de overige speciale tekens.
- Toets nul bevat het cijfer 0 en spatie.
- De hekjes-toets verandert het hoofdlettergebruik van de letters en schakelt tussen numerieke en alfanumerieke invoer op het toetsenbord.
- Als u de hekjes-toets langer ingedrukt houdt, wordt een menu met emoji's geopend. Druk op de bevestigingstoets om de geselecteerde emoji in te voeren.
- Om in de tekst te bewegen, drukt u op de omlaag- of omhoog-toets. Om te kiezen tussen verplaatsen per teken of per woord, drukt u op de linker actie-toets.

Tip: Het schrijven van een bepaald teken kan worden voltooid door op de omlaag-toets te drukken. Hierdoor kan onmiddellijk een ander teken van dezelfde toets worden geschreven (zonder te wachten op het klikgeluid, dat aangeeft dat het teken is ingevoerd).

Tekstinvoer via dicteerfunctie

Tijdens het opstellen van een bericht of andere tekstinvoer kan de dicteerfunctie worden opgeroepen door op de actieknop aan de zijkant te drukken. Na een pieptoon begint u met het dicteren van de tekst. Na ieder gedictieerd fragment trilt de telefoon

licht. Op dat moment kan het dicteren handmatig worden beëindigd door op de bevestigingstoets, de terug-toets of de actieknop aan de zijkant te drukken. De dicteerfunctie wordt automatisch beëindigd als er gedurende enkele seconden geen tekst wordt gedictreed.

Tijdinvoer

Tijdens het invoeren van de tijd in toepassingen zoals Wekker, Kalender, of het instellen van de tijd van de telefoon, gebruikt u de numerieke toetsen om vier tijdcijfers in te voeren. Het eerste cijferpaar staat voor uren en het tweede cijferpaar voor minuten.

3.6 Spraakbesturing

De telefoon kan ook worden bediend door spraakcommando's. Om spraakbesturing op te roepen, drukt u op de actieknop aan de zijkant. Begin na de pieptoon met het dicteren van het commando. De spraakbesturing heeft de volgende functionaliteit:

- Het openen van een toepassing door het uitspreken van de naam. Om bijvoorbeeld de applicatie "berichten" te openen, start u de spraakbesturing en zegt u "berichten".
- Het bellen van een contact uit de contactlijst. Om bijvoorbeeld Michael te bellen, start u de spraakbesturing en zegt u "bel Michael".
- Het schrijven van een bericht naar een contact uit de contactlijst. Om bijvoorbeeld een bericht aan Michael te schrijven, start u de spraakbesturing en zegt u "stuur bericht naar Michael". Daarna kan de tekst worden ingevoerd via het numerieke toetsenbord of via de dicteerfunctie.

3.7 SOS-knop

Houd de SOS-knop langer ingedrukt om bij noodgevallen de toegewezen contactpersoon te bellen. Bevestiging is vereist. Als er geen contactpersoon is gekoppeld aan de SOS-knop, dan kunt u de SOS-knop langer ingedrukt houden en in het geopende menu een contactpersoon voor noodgevallen toewijzen.

3.8 Extern toetsenbord

De telefoon kan ook worden bediend met een extern toetsenbord dat via de USB-C-aansluiting van de telefoon is aangesloten. De indeling van het externe toetsenbord kan worden gewijzigd in de toetsenbordinstellingen.

Externe toetsenbordnavigatie

- De pijltoetsen Omhoog en Omlaag hebben dezelfde functie als de Omhoog- en Omlaag-toetsen van de telefoon.
- De Enter-toets heeft dezelfde functie als de Bevestigingstoets.
- De Escape en Backspace toetsen hebben dezelfde functie als de Terug-toets.
- De Cmd of Win toetsen hebben dezelfde functie als de Actieknop aan de zijkant.
- De toets Menu heeft dezelfde functie als de Linker actie-toets.
- Druk op de Ctrl-toets om de huidige tekst te lezen.
- Druk op de Alt-toets om de huidige tekst te spellen.
- Druk op de Volume omhoog en Volume omlaag toetsen om het volume van de telefoon harder of zachter te zetten.

Typen met extern toetsenbord

- Druk op de Enter-toets om een nieuwe regel in te voeren.
- Druk tegelijkertijd op de Ctrl- en Enter-toets om de tekst te bevestigen.
- De F1-toets heeft dezelfde functie als de Asterisk-toets.
- De F2-toets heeft dezelfde functie als de Hekjes-toets.
- Wanneer NumLock is ingeschakeld, kan het numerieke toetsenbord worden gebruikt om getallen in te voeren.

3.9 Bestandsoverdracht van PC naar BlindShell

Windows apparaten

De telefoon moet worden herkend als een extern apparaat. Daarna kunnen bestanden via een bestandsverkenner van de computer naar de telefoon worden gekopieerd. Als het apparaat niet door de computer wordt herkend, installeer dan de nieuwste updates en controleer of er een MTP-stuurprogramma aanwezig is.

Apple apparaten

Om bestanden van een Mac-apparaat naar de telefoon te kopiëren, is Android File Transfer-software vereist. Deze software kan hier worden gedownload: <https://www.android.com/filetransfer/>.

Linux apparaten

De telefoon zou automatisch door de computer herkend moeten worden. Kopieer de bestanden naar de telefoon met een bestandsverkenner.

4 BlindShell functies

4.1 Hoofdscherm

Het hoofdscherm is het startpunt bij het gebruik van de telefoon. Het geeft de actuele tijdsinformatie aan en, als die er zijn, beknopte informatie over het aantal gemiste meldingen, zoals ongelezen berichten, gemiste oproepen, enz. De volgende acties kunnen vanuit het hoofdscherm worden uitgevoerd:

- Om het hoofdmenu te openen, drukt u op de bevestigingstoets, de omhoog-toets of de omlaag-toets.
- Om een nummer te bellen, drukt u op de desbetreffende cijfers op het numerieke toetsenbord en belt u het gekozen nummer door op de bevestigingstoets te drukken.
- Om een snelkiesnummer te activeren, houdt u het betreffende nummer op het numerieke toetsenbord langer ingedrukt. Als er geen sneltoets aan het nummer is toegewezen, zal er een menu openen waarin u een sneltoets kunt toewijzen.
- Houd de bevestigingstoets langer ingedrukt om de oproepgeschiedenis te openen.

Houd de terug-toets langer ingedrukt om vanaf iedere positie op de telefoon terug te keren naar het hoofdscherm.

4.2 Oproepen

Via de menu-optie Oproepen kunt u bellen naar nummers of contacten uit de contactlijst. Dit menu bevat verder recente oproepen, oproepstatistieken en geblokkeerde nummers.

Een inkomend gesprek beantwoorden

- Om een inkomend gesprek te beantwoorden, drukt u op de bevestigingstoets.
- Om een gesprek te weigeren of te beëindigen, drukt u op de terug-toets.

Aankondiging van de naam van de beller

Om de naam van de beller aan te kondigen, drukt u op de rechter actietoets. De automatische aankondiging van de naam van de beller kan worden ingeschakeld in de

instellingen voor geluid en spraakuitvoer van de telefoon. Wanneer een dubbele SIM wordt gebruikt, wordt aangegeven welke SIM-kaart de oproep ontvangt.

Contact opbellen

Met de menu-optie Contact opbellen opent u de contactlijst. Blader door de lijst en druk op de bevestigingstoets om de geselecteerde contactpersoon te bellen. Terwijl u door de contactlijst bladert, kunt u de letter op het toetsenbord intoetsen om naar de contacten gaan die met deze letter beginnen.

Nummer kiezen

In de menu-optie Nummer kiezen, kunt u nummers invoeren. Typ het telefoonnummer en druk op de bevestigingstoets om het gesprek te beginnen.

Recente oproepen

De menu-optie Recente oproepen bevat een lijst van alle inkomende en uitgaande oproepen en hun details. Druk op de bevestigingstoets van het geselecteerde oproep-item om een menu met de volgende opties te openen:

- Bellen het contact/nummer.
- Schrijf SMS.
- Gespreksduur.
- Sla het nummer op in contacten (als het nog niet is opgeslagen).
- Voeg het nummer toe aan de bestaande contactpersoon (als deze nog niet is opgeslagen).
- Nummer blokkeren.
- Verwijder de oproep uit de geschiedenis.
- Alle geschiedenis verwijderen Hiermee worden alle gesprekken uit de oproepgeschiedenis gewist.

Oproepstatistieken

De menu-optie Oproepstatistieken opent een lijst met oproepstatistieken van de afgelopen maand. In de laatste menu-optie kan een startdag voor de maandelijkse cyclus ingesteld worden. Het stelt de begindag in van de maand vanaf wanneer de statistieken worden opgenomen.

Geblokkeerde nummers

De menu-optie Geblokkeerde nummers opent een lijst met contacten en telefoonnummers die niet naar uw toestel kunnen bellen. Om een nieuw geblokkeerd nummer of contactpersoon toe te voegen, selecteert u de optie Voeg geblokkeerd nummer toe. Als u de blokkering van het nummer of contact wilt opheffen, drukt u met de bevestigingstoets op het geselecteerde nummer of contact.

Een telefoongesprek opnemen

Om een telefoongesprek op te nemen, drukt u tijdens een actief telefoongesprek op de bevestigingstoets. Selecteer de menuoptie Opname gesprek starten. Om de opname te stoppen, drukt u op de bevestigingstoets en selecteert u Stop opname gesprek. Het opgenomen telefoongesprek wordt opgeslagen in de map BlindShell/opnames en is te vinden in de Opnamelijst van de Spraakrecorder applicatie.

Luidspreker aanzetten tijdens een telefoongesprek

Om de luidspreker tijdens een telefoongesprek aan te zetten, drukt u tijdens een actief telefoongesprek op de bevestigingstoets. Selecteer de menu-optie Zet luidspreker aan. Om de luidspreker uit te schakelen, drukt u op de bevestigingstoets en selecteert u de menu-optie Zet luidpreker uit. De automatische luidspreker kan worden ingeschakeld in de geluidsinstellingen van de telefoon.

Microfoon uitschakelen tijdens een telefoongesprek

Om de microfoon tijdens een telefoongesprek uit te schakelen, drukt u tijdens een actief telefoongesprek op de bevestigingstoets. Selecteer de menu-optie Microfoon uitschakelen. Om de microfoon weer in te schakelen, drukt u op de bevestigingstoets en selecteert u Microfoon inschakelen.

Recente berichten lezen

Om een recent bericht te lezen tijdens een telefoongesprek, drukt u op de bevestigingstoets tijdens een actief telefoongesprek. Selecteer de menu-optie Berichten.

Tweede inkomend gesprek beantwoorden

Een tweede inkomend gesprek tijdens een actief telefoongesprek wordt gemeld door herhaalde pieptonen. Druk op de rechter actie-toets om de naam van de beller van het tweede inkomende gesprek aan te laten kondigen. Druk op de bevestigingstoets om het tweede gesprek aan te nemen en het lopende gesprek in de wacht te zetten. Druk op de terug-toets om een actief gesprek te beëindigen.

4.3 Berichten

Met de menu-optie Berichten kunt u berichten sturen naar nummers of contactpersonen uit de contactlijst. Deze menu-optie bevat ook eerdere gesprekken (inkomende en uitgaande berichten), concepten, en berichtinstellingen.

Opmerking: Terwijl u een bericht schrijft, kunt u op de rechter actie-toets drukken om het hele bericht en het aantal resterende tekens tot het volgende bericht terug te lezen.

Stuur SMS naar contact

Door de menu-optie Stuur SMS naar contact te selecteren, opent u de contactlijst. Blader door de lijst en druk op de bevestigingstoets om het gewenste contact te selecteren. Schrijf het bericht en verstuur het door op de bevestigingstoets te drukken.

Stuur SMS naar nummer

Door de menu-optie Stuur SMS naar nummer te selecteren, opent u een menu met de volgende opties:

- Nummer - voer het telefoonnummer van de ontvanger in.
- Tekst - voer de tekst in.
- Bericht verzenden - selecteer om het bericht te verzenden.

Stuur SMS naar meerdere ontvangers

Door de menu-optie Stuur SMS naar meerdere ontvangers te selecteren, opent u een menu met de volgende opties:

- Ontvangers - voeg ontvangers van het bericht toe. Er kunnen meerdere ontvangers worden toegevoegd. Om de ontvanger uit de lijst te verwijderen, gaat u naar de ontvanger in de lijst en drukt u op de bevestigingstoets.
- Tekst - voer de tekst in.
- Bericht verzenden - selecteer om het bericht te verzenden.

SMS-berichten

Door de menu-optie SMS-berichten te selecteren, opent u de berichtenlijst met contactpersonen en nummers. Selecteer een gesprek om inkomende en uitgaande berichten te tonen van betreffende contactpersoon of nummer. Door met de bevestigingstoets op het geselecteerde bericht te drukken, opent u een menu met de volgende opties:

- Beantwoorden - opent tekstinvoer. Typ het bericht en druk op de bevestigingstoets om het antwoord te verzenden.
- Doorsturen - hiermee kunt u berichten doorsturen. Selecteer een contactpersoon, nummer of e-mailadres om het bericht door te sturen.
- Bellen - belt de contactpersoon of het telefoonnummer.
- Verwijderen - verwijdert het bericht.
- Gesprek verwijderen - verwijdert alle inkomende en uitgaande berichten van dit gesprek.
- Opslaan als nieuw contact - slaat het nummer op in contacten (als het nog niet is opgeslagen).
- Toevoegen aan contact - voegt het nummer toe aan de bestaande contactpersoon (als deze nog niet is opgeslagen).
- Nummers in dit bericht - toont een lijst van nummers die in het bericht voorkomen. Druk op de bevestigingstoets om een actie uit te voeren met het geselecteerde nummer.

Concepten

Door de menu-optie Concepten te selecteren, opent u de lijst met berichten die als concept zijn opgeslagen. Een concept is een onvoltooid bericht dat niet werd verzonden. Door met de bevestigingstoets op het geselecteerde concept te drukken, kunt u dit concept afmaken, verzenden of opnieuw als concept opslaan.

Berichtinstellingen

Door de menu-optie Berichtinstellingen te selecteren, opent u het menu voor het instellen van meldingen over de aflevering van berichten of voor het in- en uitschakelen van diakritische tekens bij het verzenden van berichten.

4.4 Contactpersonen

Door de menu-optie Contactpersonen te selecteren, kunt u door contacten bladeren, nieuwe contacten toevoegen of bestaande contacten bewerken. Hier kunt u ook sneltoetsen instellen, back-ups van contacten maken en contactpersonen importeren.

Contactlijst

Door de menu-optie Contactlijst te selecteren, opent u de lijst met contacten die in de telefoon en op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Terwijl u door de contactlijst bladert, kunt u de letter op het toetsenbord intoetsen om naar de contacten gaan die met deze letter beginnen. Door met de bevestigingstoets op de geselecteerde contactpersoon te drukken, opent u een menu met de volgende opties:

- Bellen - belt de contactpersoon.
- Bericht verzenden - opent een tekst invoer-veld. Na de tekst invoer drukt u op de bevestigingstoets om het bericht naar de contactpersoon te verzenden.
- E-mail verzenden - opent een nieuw e-mailbericht, het veld Ontvangers is al ingevuld met het e-mailadres van de contactpersoon (alleen beschikbaar als het e-mailadres van de contactpersoon is opgeslagen).
- Contact bewerken - opent een veld om contactgegevens te bewerken.
- Beltoon kiezen - opent een lijst met beltonen. Blader door de lijst en druk op de bevestigingstoets om een ringtone aan de contactpersoon toe te wijzen. Deze melodie zal worden afgespeeld tijdens een inkomende oproep van deze contactpersoon.
- Verzend contact als visitekaartje - opent een menu om een contact of telefoonnummer te selecteren waarnaar het huidige contact als visitekaartje zal worden verzonden.
- Contact verwijderen - verwijdert de contactpersoon uit de contactlijst.

SIM kaart contacten

Contactpersonen die zijn opgeslagen op een SIM-kaart worden weergegeven in de contactlijst. Als een contactpersoon uit de contactlijst wordt verwijderd, wordt deze

ook van de SIM-kaart verwijderd. Als een contactpersoon van de SIM-kaart wordt bewerkt, wordt deze als een nieuw contactpersoon op de telefoon opgeslagen en wordt de oorspronkelijke contactpersoon van de SIM-kaart verwijderd.

Nieuw contact toevoegen

Met de menu-optie Nieuw contact toevoegen, opent u een veld voor het toevoegen van een nieuw contact. De volgende contactinformatie kan worden opgeslagen: voor- naam, achternaam, mobiel, vast netwerk, business, andere, e-mailadres en postadres. Selecteer de menu-optie Contactpersoon opslaan om de contactpersoon op te slaan.

Sneltoetsen

Met de sneltoets kunt u een snelkiesnummer instellen voor elk nummer op het toetsenbord. Het snelkiesnummer wordt gebruikt voor het snel kiezen van maximaal 10 geselecteerde contactpersonen. Om een snelkiesnummer aan een nummer toe te wijzen, bladert u door de lijst met nummers (0-9) en drukt u met de bevestigingstoets op het gekozen nummer. Om een snelkiesnummer van het nummer te verwijderen, selecteert u het desbetreffende nummer. Hier kan ook een contactpersoon voor noodgevallen aan de SOS-knop worden toegewezen.

Als u op het hoofdscherm bent, houdt u het nummer op het toetsenbord langer ingedrukt om de toegewezen contactpersoon snel te bellen.

Contactpersonen importeren

Met de menu-optie Contactpersonen uit bestand importeren, importeert u contacten uit het bestand naar de contactlijst van de telefoon.

- Om contacten te importeren, kopieert u het .vcf-bestand naar de hoofdmap van de SD-geheugenkaart, indien aanwezig, of naar de hoofdmap van het interne geheugen van de telefoon. Het bestand moet de naam Contacten.vcf hebben.
- Als Contacten.vcf op beide geheugens staat, wordt het bestand op de SD-geheugenkaart gebruikt.
- Contactpersonen in het Contacten.vcf-bestand die identiek zijn aan contactpersonen die al in de contactlijst zijn opgeslagen, worden overgeslagen tijdens het importeren.
- Nadat het importeren van contactpersonen is voltooid, krijgt het Contacten.vcf bestand de naam Contacten-geïmporteerd .vcf.

Back-up maken van contacten

Met de menu-optie Maak back-up van contacten voert u een back-up van contacten uit naar het Contacten.vcf bestand.

- Als de SD-geheugenkaart in de telefoon zit, wordt het Contacten.vcf-bestand aangemaakt in de hoofdmap van de SD-geheugenkaart.
- Als er geen SD-geheugenkaart in de telefoon zit, wordt het Contacten.vcf-bestand aangemaakt in de hoofdmap van het interne geheugen van de telefoon.

Contactinstellingen

Met de menu-optie Contactinstellingen opent u een menu met de volgende opties:

- Sorteer contacten - wijzigt contactsortering, de contactlijst kan alfabetisch worden gerangschikt op voornaam of op achternaam.
- Weergavevolgorde - wijzigt de volgorde van het lezen van de contactpersonen. Zowel een voornaam als een achternaam kunnen eerst worden vermeld.
- Zichtbaarheid SIM-contacten - hiermee kunt u contactpersonen die zijn opgeslagen op SIM-kaarten verbergen of weergeven in de contactlijst.
- Verwijder alle contacten.

4.5 Toepassingen

Hulpmiddelen

Alarm

Met de alarmtoepassing kunt u op specifieke tijden en dagen alarmen aanmaken. Om een actief alarm af te zetten, drukt u op de bevestigingstoets of de terug-toets.

Nieuw alarm

Om een nieuw alarm te maken, selecteert u de menu-optie Nieuw alarm, dat een formulier opent met de volgende opties:

- Stel tijd in - opent nummerinvoer waarin een 4-cijferige tijd als invoer wordt geaccepteerd. Het eerste cijferpaar staat voor uren en het tweede cijferpaar voor minuten.
- Herhaling instellen - opent een lijst met dagen van de week. Selecteer de dagen waarop het alarm moet afgaan. Als geen van de dagen is geselecteerd, zal het alarm dagelijks afgaan.
- Alarm opslaan - slaat het alarm op en activeert het.

Het alarm bewerken

Selecteer het bestaande alarm uit de lijst om een menu te openen met de volgende opties:

- Alarm activeren/deactiveren - een inactief alarm wordt in de telefoon opgeslagen, maar zal niet afgaan omdat het niet langer een actief alarm is.
- Alarm wijzigen - opent een menu om de tijd en dagen van het alarm te wijzigen.
- Alarm verwijderen - verwijdert het alarm.

Rekenmachine

Met de rekenmachine kunnen basis rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

- Druk op de bevestigingstoets om de bewerking uit te voeren.
- Druk op de asterisk-toets om een wiskundige bewerking te kiezen.
- Druk op de hekjes-toets om de decimale punt in te voeren.

Kalender

Met de Kalender-applicatie kan de agenda worden opgesteld en bijgehouden.

Nieuwe gebeurtenis toevoegen

Om een nieuwe afspraak toe te voegen, selecteert u de menu-optie Nieuwe afspraak toevoegen. Hiermee wordt een menu geopend met de volgende items:

- Titel - de titel van de activiteit (verplicht).
- Locatie - de locatie van de activiteit, of meer informatie over de activiteit.
- Startdatum - de eerste dag van de activiteit (verplicht).

- Begintijd - de begintijd van de activiteit. De standaardwaarde is de hele dag.
- Einddatum - de laatste dag van de activiteit.
- Eindtijd - de eindtijd van de activiteit.
- Herhalingen - selecteer of de activiteit periodiek moet worden herhaald. Stel het aantal herhalingen in, de einddatum van de herhalingen, of onbeperkte herhalingen.
- Herinnering - stelt de herinnering voor de activiteit in.
- Bewaar gebeurtenis - slaat de activiteit op.

De agenda doorbladeren

Om door de agenda te bladeren, selecteert u de menu-optie Agenda. Om de activiteit te bewerken of te verwijderen, drukt u op de bevestigingstoets.

De kalender doorbladeren

Om door de kalender per week en dag te bladeren, selecteert u de menu-optie Zoek in kalender. Selecteer een jaar, maand en week om het aantal activiteiten in die week te zien. Druk op de bevestigingstoets om door activiteiten per dag of per hele week te bladeren.

Vind gebeurtenis

Om een activiteit te vinden, selecteert u de menu-optie Zoeken en voert u de naam van de activiteit in.

Naamdagen

Met de menu-optie Naamdagen kunt u de naamdagen van de komende zeven dagen doorbladeren, de datum op naam zoeken of de naam op datum zoeken.

Feestdagen

Om nationale feestdagen in de agenda weer te geven, selecteert u de menu-optie Instellingen en stelt u de zichtbaarheid van nationale feestdagen in op zichtbaar. Om deze functie te kunnen gebruiken, is een internetverbinding vereist voor het downloaden van de lijst met feestdagen.

Zaklamp

De Zaklamp applicatie schakelt het LED-lampje van de camera in.

Minutentimer

De minutentimer is een eenvoudige afteltimer die na een ingestelde tijd een melodie afspeelt. Wanneer de minutentimer actief is, kunnen andere telefoonfuncties worden gebruikt. Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de bevestigingstoets of de terugtoets.

Aftellen instellen

- Om de timer in te stellen, drukt u op de bevestigingstoets.
- Selecteer de menu-optie Tijd instellen om de uren, minuten en seconden van het aftellen in te stellen.
- Selecteer de menu-optie Activeren om de timer te activeren.

Pauzeren en annuleren van het aftellen

- Terwijl de timer loopt, drukt u op de bevestigingstoets.
- Selecteer de menu-optie Pauze om de timer te pauzeren op de timerstand van dat specifieke moment of selecteer de menu-optie Annuleren om de timer te stoppen en terug te zetten op de begintijd.
- Om de gepauzeerde timer weer te activeren, drukt u op de bevestigingstoets en selecteert u de menu-optie Hervatten.

Notities

Met de Notities applicatie kunt u notities maken.

Om een bestaande notitie te bewerken, te verzenden of te verwijderen, selecteert u de desbetreffende notitie in uit de notitielijst.

Stopwatch

De Stopwatch is een hulpmiddel om de verstreken tijd te meten. Wanneer de Stopwatch actief is, kunnen andere telefoonfuncties worden gebruikt.

- Om de Stopwatch te activeren, drukt u op de bevestigingstoets om het menu te openen en selecteert u Start stopwatch.
- Om de Stopwatch te stoppen, drukt u tijdens het lopen van de stopwatch op de bevestigingstoets.
- Om de Stopwatch te hervatten, drukt u op de bevestigingstoets om het menu te openen en selecteert u Stopwatch hervatten.
- Om de Stopwatch vanaf nul te herstarten, drukt u op de bevestigingstoets om het menu te openen en selecteert u Stopwatch hervatten.
- Om de teller te resetten en de tijd op nul te zetten, drukt u op de bevestigingstoets om het menu te openen en selecteert u resetten.

Eenhedenomzetter

Met de Eenhedenomzetter kunnen fysieke eenheden worden omgerekend.

Om eenheden om te rekenen, stelt u de invoer- en uitvoereenheid en waarde in en selecteert u Omrekenen.

Spraakrecorder

Met de Spraakrecorder applicatie kunt u spraakmemo's maken of geluid opnemen.

- Om de opname op te slaan, drukt u tijdens de opname op de bevestigingstoets.
- Om de opname te pauzeren, drukt u tijdens de opname op de terug-toets. Om de opname te hervatten, drukt u op de bevestigingstoets. Om de opname op te slaan, drukt u op de terug-toets terwijl de opname gepauzeerd is.
- Om de opname af te spelen, te hernoemen, te delen of te verwijderen, selecteert u de opname in de opnamelijst.

Weer

De Weer-applicatie toont het huidige weer van de huidige locatie en een voorspelling voor de komende drie dagen.

Let op: Deze functie vereist een internetverbinding.

Lokaal weer

Toont het weer voor de locatie waar je je momenteel bevindt. De voorspelling is zichtbaar voor de komende drie dagen.

- Voorspelling per uur - een voorspelling per uur voor elke dag is te vinden door de relevante dag te selecteren. Informatie zoals temperatuur, windsnelheid of luchtvochtigheid voor elk uur is zichtbaar.
- Details - een meer gedetailleerd overzicht van het weer voor de betreffende dag. Zoals zonsopgang, zonsondergang, UV-index of luchtkwaliteitsindex.

UV-index

Ultraviolette index, die de intensiteit van zonnestraling laat zien. Hoe hoger de UV-index, hoe sterker de zonnebrandcrème die je in de zon moet gebruiken.

Luchtkwaliteitsindex

Dit geeft aan hoe schoon of vervuild de lucht is op jouw locatie. Hoe lager de luchtkwaliteitsindex is, hoe gezonder de lucht buiten is. De luchtkwaliteitsindex is alleen beschikbaar voor de huidige dag, omdat het niet voorspeld kan worden en de gegevens per moment gemeten worden.

Zoek een stad

Om een stad te zoeken, selecteer de Zoek een stad menu-optie, die de zoekbalk opent. Elke stad van elk land kan worden gevonden. De gezochte stad kan ook worden opgeslagen in favorieten.

Favorieten

Een lijst van opgeslagen steden kan hier worden gevonden of verwijderd.

Instellingen

Pas de temperatuur, windsnelheid en druk naar wens aan.

- Temperatuur - kan worden geschakeld tussen Celsius en Fahrenheit.
- Windsnelheid - opties zoals kilometers per uur, meters per seconde, mijlen per uur en knopen kunnen worden geselecteerd.
- Druk - millibars, hectopascals, millimeters kwik of inches kwik kunnen worden geselecteerd.

Communicatie

E-mail

De e-mailapplicatie is een e-mailprogramma waarmee één bestaand e-mailaccount kan worden beheerd.

Inloggen bij een e-mailaccount

Om in te loggen bij een e-mailaccount, voert u een e-mail adres, SMTP server adres, IMAP server adres en wachtwoord in. Selecteer vervolgens Opslaan. Informatie over de SMTP- en IMAP-serveradressen kunt u vinden op de website van de e-mailprovider. Belangrijke aandachtspunt: In sommige gevallen moet u applicaties van derden expliciet toestemming geven om op afstand toegang te krijgen tot uw e-mail, of moet u IMAP-toegang voor uw e-mailaccount inschakelen.

Afmelden bij een e-mailaccount

Om uit te loggen bij een e-mailaccount of om aanmeldingsgegevens te wijzigen, ga naar e-mail Instellingen en selecteer Account bewerken.

Media

Camera

Met de Camera kunt u beelden vastleggen met de geïntegreerde camera van de telefoon.

- Een klikkend geluid geeft aan dat de camera geopend is en klaar is om een foto te maken.
- Om een foto te maken, richt u de camera op het voorwerp of de omgeving en drukt u op de bevestigingstoets.
- Het sluitergeluid geeft aan dat de foto is gemaakt. Selecteer vervolgens Afbeelding opslaan of Bekijk afbeelding.
- U wordt gevraagd een korte beschrijving op te nemen wanneer u de afbeelding opslaat. Deze beschrijving beschrijft de afbeelding in de galerij.

FM Radio

Met de FM-radio kunnen FM-radiozenders worden afgespeeld. Koptelefoons moeten worden aangesloten om de FM-radio te gebruiken, ze dienen als antenne.

- Om een radiozender af te spelen, selecteert u de menu-optie Radio afspelen.
- Om automatisch op de volgende/vorige radiozender af te stemmen, drukt u op de omlaag-/omhoog-toets.
- Om het radiostation aan de favorieten toe te voegen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Opslaan in favorieten. Voer dezelfde stappen uit om uit favorieten te verwijderen.
- Om de frequentie nauwkeurig af te stemmen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Handmatig afstemmen. De omlaag- en omhoog-toets verplaatsen de frequentie nu met 0,1 MHz. Voer dezelfde stappen uit om terug te schakelen naar automatisch afstemmen.
- Om een specifieke frequentie in te voeren, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Frequentie invoeren.

Afbeeldingen

Met de toepassing Afbeeldingen kunt u door afbeeldingen bladeren die met de toepassing Camera zijn gemaakt of in de telefoon zijn opgeslagen.

- Om door de beelden te bladeren die door de camera zijn vastgelegd, selecteert u de menu-optie Camera afbeeldingen.
- Als u gekopieerde of gedownloade afbeeldingen op de telefoon wilt doorbladeren, selecteert u de menu-optie Overige afbeeldingen.
- De gesproken beschrijving wordt afgespeeld terwijl u door de beelden bladert.
- Om in te zoomen op de afbeelding, drukt u op de bevestigingstoets terwijl u door de afbeeldingen bladert en selecteert u Inzoomen. Volg dezelfde stappen om uit te zoomen. Inzoomen kan door op de hekjes-toets te drukken, uitzoomen door op de asterisk-toets te drukken.
- Om informatie over de afbeelding te zien, de opgenomen beschrijving te wijzigen of het beeld te wissen, drukt u op de bevestigingstoets terwijl u door de beelden bladert en selecteert u de desbetreffende menu-optie.

Afbeelding delen

Om een afbeelding te delen, drukt u op de bevestigingstoets terwijl u door de afbeeldingen bladert en selecteert u de menu-optie Afbeelding delen. Hiermee wordt een menu geopend met de volgende opties:

- Afbeelding delen via e-mail - opent een nieuwe e-mail met een afbeelding als bijlage.
- Afbeelding delen via sms - De afbeelding wordt gecodeerd en geüpload naar de BlindShell-servers. De ontvanger krijgt een sms-bericht met een link naar deze afbeelding. Voor deze functie is een internetverbinding vereist.

Kosten en privacy:

- Wij maken geen gebruik van MMS om deze functie te ondersteunen. Uw zult een standaard SMS-tarief in rekening gebracht krijgen door uw mobiele provider (en voor de data-overdracht als u mobiele data gebruikt).
- Alle afbeeldingen die via deze functie worden verzonden, zijn end-to-end versleuteld met een beveiligd cijfercode (AES). De decoderingssleutel bevindt zich in het tekstbericht en wordt alleen naar de door u gekozen ontvanger en nooit ergens anders naartoe verzonden. Hoewel de versleutelde afbeeldingsgegevens op onze servers worden opgeslagen, kan niemand (ook niet het bedrijf BlindShell) de inhoud van gedeelde afbeeldingen bekijken zonder de sleutel.
- Wij bewaren gecodeerde afbeeldingsgegevens gedurende ten minste 14 dagen na het uploaden.

Internet Radio

Met Internet Radio kunt u luisteren naar internet radiozenders van over de hele wereld.

- Om een radiozender te beluisteren, selecteert u de zender uit de zenderlijst.
- Om de radiozender aan favorieten toe te voegen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Opslaan bij favorieten. Voer dezelfde stappen uit om een zender uit favorieten te verwijderen.

Opmerking: Voor deze functie is een internetverbinding vereist.

Muziekspeler

Met de Muziekspeler kunt u audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon of op de SD-geheugenkaart. Plaats audiobestanden in de map Muziek van de telefoon of geheugenkaart om ze in de Muziekspeler op te nemen.

- Om een audiobestand af te spelen, selecteert u het bestand uit de lijst met liedjes.
- Om het volgende/vorige audiobestand af te spelen, drukt u op de omlaag-/omhoog-toets.
- Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de terug-toets.
- Om terug te gaan naar de lijst met liedjes, drukt u op de terug-toets terwijl u pauzeert.
- Om vooruit te spoelen, houdt u tijdens het afspelen de omlaag-toets ingedrukt.
- Om terug te spoelen, houdt u tijdens het afspelen de omhoog-toets ingedrukt.
- Om het audiobestand aan favorieten toe te voegen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Opslaan in favorieten. Voer dezelfde stappen uit om een audiobestand uit favorieten te verwijderen.
- Om het audiobestand te wissen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets en selecteert u Lied wissen.

YouTube

Met de YouTube applicatie kan vrij beschikbare audiovisuele inhoud die op de YouTube-site is geplaatst, worden afgespeeld.

Belangrijk aandachtspunt:

- Alle YouTube-video's zijn het werk van onafhankelijke auteurs. BlindShell is op geen enkele wijze verbonden met het YouTube-platform of de makers van de content en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op YouTube wordt gepubliceerd.
- We hebben toegang tot YouTube in anonieme modus. BlindShell vereist of ondersteunt geen gebruikerslogin. YouTube Premium-inhoud of inhoud met leeftijdsbeperkingen is niet beschikbaar.
- De lijsten met uw favoriete video's, geschiedenis of kanalen die in uw BlindShell zijn opgeslagen, worden niet gesynchroniseerd met andere apparaten of uw YouTube-account.
- Sommige video's of livestreams kunnen niet-compatibele videoformaten gebruiken die niet op uw telefoon kunnen worden afgespeeld.

Een video afspelen

- Om naar een video of kanaal te zoeken, selecteert u de menu-optie Zoeken.
- Om door recent bekeken video's te bladeren, selecteert u de menu-optie Geschiedenis.
- Om door de favoriete video's te bladeren, selecteert u de menu-optie Favorieten.

- Om de nieuwste video's in verschillende categorieën te bekijken, selecteert u de menu-optie Categorieën.
- Om video-opties te openen, selecteert u de video uit de lijst.
- Om de video af te spelen, selecteert u de optie Afspelen vanaf het begin of Afspelen hervatten in de video-opties.

Instellingen

Videomodus - hiermee stelt u de oriëntatie van het videobeeld in. Het staande beeld is de standaard oriëntatie van de telefoon, de video is gecentreerd op het scherm. Het liggende beeld roteert het videobeeld 90 graden met de klok mee en maakt het videobeeld schermvullend. Alleen de geluidsoptie schakelt het downloaden van videobeeldgegevens uit om de hoeveelheid gedownloade gegevens te verminderen.

Boeken

Book reader

De Boekenlezer-applicatie ondersteunt het lezen van luisterboeken in mp3, m4a en m4b audioformaten, evenals EPUB, Daisy en boeken in txt-bestanden. Om een boek in de Book reader te plaatsen, downloadt u een boek in de Bibliotheek applicatie of kopieert u de boekbestanden naar een BlindShell/Boeken map naar het interne geheugen van de telefoon of op de SD-geheugenkaart. De map of het bestand in deze map wordt herkend als een los boek in de Book reader.

- Om een boek te lezen, selecteert u het boek in de Boekenlijst en selecteert u Lezen vanaf het begin of Verder lezen, als u al in het boek aan het lezen bent.
- Druk op de terug-toets om het afspelen te pauzeren.
- Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te hervatten tijdens de pauzestand.
- Druk in een luisterboek op de omlaag-/omhoog-toets om naar het volgende/vorige hoofdstuk of deel van het boek te gaan.
- Druk in een tekstboek op de omlaag-/omhoog-toets om naar de volgende/vorige passage te gaan.

Afspeelmenu

Om het afspeelmenu te openen, drukt u tijdens het afspelen op de bevestigingstoets. Het afspeelmenu heeft de volgende opties:

- Spring naar een deel van van het boek - selecteer en voer het gedeelte van het boek in waar de Book reader naar toe moet springen (getal 0-99).
- Speel het volgende hoofdstuk af - speelt het volgende hoofdstuk/deel van het boek af, als dat er is.
- Vorige hoofdstuk afspelen - speelt het vorige hoofdstuk/deel van het boek af, als dat er is.
- Voeg een bladwijzer toe - creëert een bladwijzer van de huidige positie in het boek. Voer de naam van de bladwijzer in of laat de invoer leeg om de huidige tijdstempel als naam voor de bladwijzer in te stellen.
- Beweeg in boek (alleen in audioboek) - stelt de omlaag- en omhoog-toets in om het boek 10 seconden vooruit en achteruit te spoelen. Als de omlaag- of omhoog-toets gedurende 10 seconden niet wordt ingedrukt, gaan deze toetsen weer zoals gebruikelijk werken.
- Afspeelsnelheid (alleen bij luisterboek) - verandert de afspeelsnelheid van de audio.
- Spraaksnelheid (alleen in tekstboek) - hiermee wijzigt u de spraaksnelheid in de Book reader.
- Spreektaal (alleen in tekstboek) - wijzigt de taal van de tekst naar spraak in de Book reader.

Om de leeservaring comfortabeler te maken, hebben de knoppen van het numerieke toetsenbord de volgende functies:

- 4 - Speelt het vorige hoofdstuk of deel van het boek af, indien aanwezig.
- 5 - Speelt het boek af of pauzeert het lezen van het boek.
- 6 - Speelt het volgende hoofdstuk of deel van het boek af, indien aanwezig.
- 7 - Verlaagt de afspeelsnelheid of spreektempo.
- 8 - Stelt de standaard afspeelsnelheid of spreektempo in.
- 9 - Verhoogt de afspeelsnelheid of spreektempo.
- 0 - Voegt een bladwijzer toe.

Bibliotheek

De Bibliotheek bevat een lijst van online bibliotheekdiensten die het mogelijk maken boeken te downloaden die in de Lees-app kunnen worden gelezen. Bij sommige bibliotheken is het mogelijk dat u moet inloggen met een bestaande account.

- Om door de beschikbare boeken te bladeren, selecteert u de bibliotheekdienst uit de lijst.
- Om een boek te zoeken, selecteert u de menu-optie Boek zoeken. Er kan gezocht worden op Titel, Auteur of Trefwoord.
- Om het boek te downloaden, selecteert u het boek en selecteert u de menu-optie Boek downloaden. Om het downloaden van het boek te annuleren, drukt u op de terug-toets. Het boek is beschikbaar in de Lees-app wanneer het gedownload is.

Spelletjes

Geheugenspel

Het Geheugenspel is een geluidsversie van het klassieke geheugenspel (ook wel bekend als Pexeso). Wanneer een nieuw spel begint, kiest u het geluidsthema uit de geluiden.

Het spel

Er is een veld van 12 kaarten en iedere kaart is gekoppeld aan één van de toetsen 1-9, asterisk, nul, en hekje. Uw doel is om alle overeenkomende kaartparen te vinden met hetzelfde geluid. Om te spelen, draait u eerst een kaart om door te drukken op het desbetreffende cijfer. Luister naar het geluid en probeer het te onthouden. Draai vervolgens een andere kaart om waarvan u vermoedt dat deze hetzelfde geluid heeft. U hoort dan het geluid van de tweede kaart. Als de geluiden overeenkomen, wordt het kaartpaar verwijderd, zo niet, dan blijven de kaarten op hun plaats.

Ga door tot er geen kaarten meer over zijn. Het doel is om de geluiden te onthouden in zo min mogelijk pogingen om ze te raden.

Toegankelijkheid

Piepers

Piepers helpen bij het vinden van persoonlijke voorwerpen zoals sleutels, tassen, portefeilles, kleding, enz. Plaats de pieper op het voorwerp en gebruik de BlindShell telefoon om de pieper te bellen in geval van nood.

Voor deze functie heeft u een pieperapparaat nodig. De pieper kan afzonderlijk worden aangeschaft bij uw BlindShell-leverancier. Om de pieper voor de eerste keer in te

schakelen (of na het plaatsen van een batterij), houdt u de knop op de pieper langer ingedrukt. De pieper piept meerdere malen wanneer deze is ingeschakeld. Om de pieper in te stellen, opent u de toepassing Pieper op het BlindShell toestel. Gebruik deze toepassing om de pieper te vinden of de eigenschappen ervan te bewerken.

Voeg pieper toe (koppelen)

Om de pieper aan de telefoon te koppelen, selecteert u de menu-optie Voeg pieper toe. Druk vervolgens herhaaldelijk op de toets van de pieper. Wanneer de pieper verbinding maakt met de telefoon, wordt u gevraagd een persoonlijke naam voor de pieper in te voeren.

Vind (bel) de pieper

Om de pieper met de telefoon te bellen, selecteert u de menu-optie Vind pieper en selecteert u de pieper in de lijst. Wanneer de telefoon verbinding maakt met de pieper, begint de pieper te rinkelen. Om het rinkelen te stoppen, drukt u op de bevestigingstoets.

Bewerk de pieper

Om de pieper te verwijderen (ontkoppelen) of de naam ervan te wijzigen, selecteert u de menu-optie Lijst met piepers en selecteert u de pieper uit de lijst.

Kleurenindicator

De toepassing Kleurenindicator maakt het mogelijk de kleuren van voorwerpen te detecteren. Hiervoor wordt de camera van de telefoon gebruikt die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt, boven de SOS-knop. Om de kleur te detecteren, richt u de camera op het voorwerp (op ongeveer 10 centimeter afstand) en drukt u op de bevestigingstoets om de kleur aan te kondigen.

Belangrijk aandachtspunt: De Kleurenindicator is sterk afhankelijk van de omgevingsverlichting en werkt niet goed bij weinig licht. In deze omstandigheden komt het resultaat van de kleuraanduidingen mogelijk niet overeen met de werkelijkheid.

Tip: Om de nauwkeurigheid te verhogen, herhaalt u het proces enkele malen en kiest u de kleur die in de meeste gevallen werd gedetecteerd.

Lokalisatie

De Lokalisatie applicatie verzamelt gegevens van GPS, WiFi-netwerken en mobiele netwerken om het dichtstbijzijnde fysieke adres in de actuele omgeving te lokaliseren. Het hele lokalisatieproces kan tot 30 seconden duren.

Om de locatie via SMS-bericht te verzenden, bladert u door de lijst met verkregen informatie en selecteert u de optie Bericht met locatie verzenden.

Belangrijk aandachtspunt: De nauwkeurigheid van de locatie schatting kan variëren. Vertrouw niet volledig op het resultaat, maar ga uit van de nauwkeurigheid.

Belangrijk aandachtspunt: Deze functie vereist een internetverbinding.

Vergrootglas

Met de Vergrootglas applicatie kunt u objecten inzoomen.

- Om in te zoomen op het object, richt u de camera van de telefoon op het object. Om in te zoomen, drukt u op de omlaag-toets. Als u wilt uitzoomen, drukt u op de omhoog-toets.
- Door op de bevestigingstoets te drukken, opent u een menu met de volgende opties: Schakel scherpauze aan/uit, Schakel omgekeerde kleur aan/uit, Schakel zaklamp aan/uit.

NFC object tagging

Met de NFC object tagging applicatie voor object tagging kunnen voorwerpen worden geïdentificeerd die moeilijk te herkennen zijn middels aanraking - zoals zakjes of potjes met kruiden, cosmetica en schoonmaakproducten, flessen, blikjes, enzovoort. Plak de NFC-tagsticker op het object en scan deze met de telefoon.

Voor deze functie zijn NFC-tagstickers nodig die zijn inbegrepen in de verpakking van de telefoon. Stickers zijn ook los verkrijgbaar bij uw BlindShell dealer.

Een object taggen

- Om een voorwerp te taggen, plakt u de NFC-tagsticker op het gewenste object.
- Selecteer de menu-optie Tag toevoegen en breng de tag dicht bij de achterkant van de telefoon. Typ of noteer vervolgens een objectbeschrijving.

Een object tag uitlezen

Om een tag uit te lezen, selecteert u de menu-optie Tags uitlezen en houdt u de tag tegen de achterkant van de telefoon.

Een object tag bewerken

Om een object tag te bewerken of te verwijderen, selecteert u de desbetreffende tag uit de Tags lijst.

On-line

Internetbrowser

Met de Internetbrowser kunt u door webpagina's bladeren.

Internetbrowsermenu

- Om te browsen op het Internet, selecteert u de menu-optie URL invoegen of zoeken.
- Om tijdens het browsen terug te keren naar het menu, drukt u op de terug-toets.
- Om terug te keren naar de reeds geopende webpagina, selecteert u de menu-optie Browse pagina.
- Om de pagina opnieuw te laden, terug of vooruit te bladeren, selecteert u de menu-optie Navigatie.

Browsen

- Om over de pagina-elementen te navigeren, drukt u op de omlaag- of omhoog-toets.
- Om op het geselecteerde element te klikken, drukt u op de bevestigingstoets.

Om het browsen effectiever te maken, hebben de toetsen van het numerieke toetsenbord de volgende functies:

- 1 - Schakel over op navigatie door standaardelementen.
- 2 - Schakel over naar navigatie door Rubrieken.
- 3 - Schakel over naar navigatie door Besturingselementen.

- 4 - Schakel over naar navigatie via Links.
- 5 - Schakel over naar navigatie door Woorden.
- 6 - Schakel over op navigatie door ARIA oriëntatiepunten.
- 7 - Spring naar de bovenkant van de pagina.
- 8 - Automatisch bladeren door elementen in-/uitschakelen.
- 9 - Spring naar de onderkant van de pagina.
- * - Ga terug in browsen.
- 0 - Spreek de titel uit van de huidige pagina en de navigatiemodus.
- # - Opent Help.

Zoeken op pagina

- Om tekst op de huidige pagina te zoeken, selecteert u de menu-optie Zoeken op pagina.
- Om door de zoekresultaten op de pagina te bladeren, drukt u op de omlaag-of omhoog-toets.
- Om het zoeken te annuleren en door de standaardelementen te gaan, drukt u op de toets met het cijfer 1.

Instellingen

- Earcon-instellingen - hiermee stelt u in welke gebeurtenissen worden aangekondigd door earcon (geluid) tijdens het bladeren op een webpagina.
- Zoekmachine - stelt de zoekmachine in die wordt gebruikt bij het zoeken op het Internet.
- Toon tekst overlay - toont transparante overlay over de pagina met de grote tekst van het gefocuste element.
- Privé-modus - indien geselecteerd, worden bezochte pagina's niet opgeslagen in de geschiedenis.
- Gebruik de app voor het bekijken van YouTube-video's - indien geselecteerd, worden YouTube-video's geopend in de BlindShell-toepassing.
- Browserbestanden opruimen - verwijdert de cache en tijdelijke browserbestanden.

BlindShell App Catalogus

BlindShell App Catalogus maakt het downloaden en installeren van nieuwe toepassingen op de telefoon, het beheren van geïnstalleerde toepassingen, en het controleren

op updates mogelijk. De toepassingen worden weergegeven als pakketten. Het pakket kan een set van meerdere verwante apps bevatten of het kan ook slechts één app bevatten.

Online catalogus doorbladeren

- Om door de online pakkettencatalogus te bladeren, selecteert u de menu-optie Zoek catalogus.
- Selecteer één van de volgende filters voor het doorbladeren van de catalogus: voorgestelde pakketten, pakketten zoeken op naam, pakketten doorbladeren die recent aan de catalogus zijn toegevoegd, of bladeren door alle pakketten in de catalogus zonder filter.
- Selecteer de menu-optie Alle pakketten om door pakketten te bladeren ongeacht de categorie of selecteer een specifieke categorie om door te bladeren.
- Om het gewenste pakket te downloaden en te installeren, selecteert u het pakket en selecteert u vervolgens de menu-optie Pakket installeren.
- Om meer informatie over het pakket te krijgen, selecteert u het pakket en selecteert u vervolgens de menu-optie Informatie over het pakket. Het bevat een beschrijving van het pakket, versie-informatie, de naam van een categorie waartoe het pakket behoort, en een lijst van meegeleverde apps als er meer applicaties in het pakket zitten.
- Wanneer het pakket is gedownload en geïnstalleerd, kunnen de toepassingen ervan worden gevonden in de desbetreffende categorie in de Toepassingen van de telefoon.

Opmerking: Voor deze functie is een internetverbinding vereist.

Geïnstalleerde pakketten beheren

- Om op de telefoon geïnstalleerde pakketten door te bladeren en te beheren, selecteert u de menu-optie Geïnstalleerde pakketten.
- Selecteer het pakket om de toepassing uit te voeren, pakketinformatie op te vragen, het pakket te verwijderen of toegang te krijgen tot geavanceerde opties van het pakket.
- Geavanceerde opties van de pakketten maken het mogelijk tijdelijke gegevens van het pakket te wissen of de gebruikersgegevens van de toepassing te wissen.

Opmerking: Vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd, maar ze kunnen wel worden gedeactiveerd in de Geavanceerde opties van het pakket. Wanneer

het pakket is gedeactiveerd, zal het niet worden weergegeven in de Toepassingen van de telefoon.

Bijwerken van pakketten

- Om te controleren of er updates zijn voor de pakketten of om een overzicht te krijgen van recent bijgewerkte pakketten, selecteert u de menu-optie Update.
- Pakketten worden standaard automatisch bijgewerkt. Dit kan worden gewijzigd in de Catalogus instellingen.

Catalogusinstellingen

Met de menu-optie Catalogusinstellingen kunt u het verloop van automatische updates en meldingen met betrekking tot de App Catalogus wijzigen.

4.6 Instellingen

Geluiden

Profielen

Actieve profielen

Met de menu-optie Actieve Profielen kunt u het geluidsprofiel instellen dat wordt gebruikt voor inkomende oproepen, berichten en andere meldingen. Om snel toegang te krijgen tot deze instellingen, houdt u de hekjes-toets langer ingedrukt.

De volgende profielen zijn beschikbaar:

- Beltoon en trilling.
- Alleen trillingen.
- Beltoon zonder trilling.
- Stil zonder trilling.
- Vliegtuigmodus - schakelt de radiofrequentie-signaaloverdrachttechnologieën van de telefoon uit (Bluetooth, telefonie en Wi-Fi).

Nachtmodus

Met de menu-optie Nachtmodus kunt u de nacht- en dagprofielen instellen die op een bepaald tijdstip overschakelen.

- Schakel de menu-optie Nachtmodus in door op de bevestigingstoets te drukken
- Om de begin- en eindtijd van de Nachtmodus in te stellen, selecteert u de menu-optie Begintijd of Eindtijd.
- Om het nachtprofiel te kiezen, selecteert u de menu-optie Nachtprofiel.
- Om het dagprofiel te kiezen, selecteert u de menu-optie Dagprofiel.
- U kunt een actief profiel nog altijd handmatig wijzigen via de menu-optie "Actief profiel" of door de Hekjes-toets op het hoofdscherm langer ingedrukt te houden.

Volume

Met de menu-optie Volume kunt u het volumeniveau instellen voor inkomende oproepen, notificaties, wekker en het feedbackgeluid van de telefoon.

Melodieën

Met de menu-optie Melodieën kunt u een melodie instellen voor inkomende oproepen, notificaties en alarmen. Om een eigen melodie in te stellen, kopieert u het melodiebestand naar het interne geheugen van de telefoon. Voor beltonen gebruikt u de map Beltoongeluid, voor notificaties de map Notificatiegeluid en voor alarmen de map Alarmgeluid.

Spraak

Met de menu-optie Spraak kunnen de eigenschappen van de spraakuitvoer van de telefoon worden ingesteld. De volgende eigenschappen kunnen worden gewijzigd of ingesteld:

- Spraaktempo.
- Stemvariant.
- Taaldetectie - indien ingesteld, wordt de stemuitvoer uitgesproken in de herkende taal.

- Spreek datum en tijd uit - indien ingesteld, worden datum en tijd gemeld bij het ontgrendelen van de telefoon.
- Aankondiging beller van inkomende oproep - indien ingesteld, wordt de naam van de beller automatisch gemeld bij een inkomende oproep. Druk anders op de rechter actie-toets om de naam van de beller te melden.
- Aankondiging vergrendeld toetsenbord - indien ingesteld, meldt de telefoon dat deze is vergrendeld ingeval een toets meerdere keren wordt ingedrukt als de telefoon is vergrendeld.
- Menupositie-indicator - indien ingesteld, wordt spraakuitvoer aangevuld met informatie over de huidige positie in een menu en het aantal menu-opties (bijv. "twee van vijf").
- Damping spraakuitvoer - indien ingesteld, is de spraakuitvoer uitgeschakeld.

Feedback

Met de menu-optie Feedback kunt u de extra feedback van geluid en trillingen instellen. Deze feedback vormt een aanvulling op de spraakuitvoer tijdens de bediening van de telefoon.

Herinnering notificaties

Met de menu-optie Herinnering notificaties kunt u een herinnering voor gemiste notificaties instellen. Wanneer er een nieuwe gemiste notificatie is, laat de telefoon elke vijf minuten een zachte pieptoon horen. Deze terugkerende pieptonen stoppen zodra de nieuwe gemiste gebeurtenis wordt bekeken.

Automatische luidspreker

Met de menu-optie Automatische luidspreker kunt u de automatische luidspreker tijdens een telefoongesprek in- of uitschakelen. Indien ingeschakeld, schakelt de spraakuitvoer automatisch over naar een luidspreker wanneer de telefoon tijdens een telefoongesprek van het oor weg wordt weggenomen.

Toetsenbord

Toetsenbordvergrendeling

Met de menu-optie Toetsenbordvergrendeling kunt u de toetsenbordvergrendeling inschakelen. De toetsenbordvergrendeling is bedoeld om te voorkomen dat de telefoon-toetsen ongewild worden ingedrukt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Handmatige toetsenbordvergrendeling - het toetsenbord kan alleen handmatig worden vergrendeld door de asterisktoets langer ingedrukt te houden. Om het toetsenbord te ontgrendelen, houdt u de asterisktoets langer ingedrukt.
- Automatische of handmatige toetsenbordvergrendeling - het toetsenbord wordt automatisch vergrendeld na de time-outtijd van het scherm of handmatig door langer op de asterisktoets te drukken.
- Geen toetsenbordvergrendeling - de toetsenbordvergrendeling is uitgeschakeld.

Tip: Om de actuele tijd af te lezen bij toetsenbordvergrendeling, drukt u op de bevestigingstoets. Het toetsenbord blijft vergrendeld.

Lezen tijdens het wissen van tekens

Met de menu-optie Lezen tijdens het wissen van tekens kunt u instellen wat er wordt gemeld tijdens het wissen van tekens tijdens tekstinvoer. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Lees het laatst overgebleven teken na het wissen.
- Lees het gewiste karakter.

Herhalen tijdens het schrijven van tekens

Met de menu-optie Herhalen tijdens het schrijven van tekens kunt u het herhalen van geschreven tekst tijdens tekstinvoer instellen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Herhaal woord na een spatie.
- Herhaal volledige tekst na spatie.
- Niet herhalen.

Hoofdlettersignalering

Met de menu-optie Hoofdlettersignalering kunt u instellen hoe hoofdletters tijdens tekstinvoer worden gesignaleerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Verbaal signaal - meldt "hoofdletter" bij het typen van hoofdletters.
- Signaal met hogere stem - wijzigt de toonhoogte van de stemuitvoer bij het typen van hoofdletters.
- Niet signaleren - hoofdlettersignalering is uitgeschakeld.

Lezen van tekens tijdens het schrijven

Met de menu-optie Lezen van tekens tijdens het schrijven kunt u instellen of tekens tijdens het schrijven zullen worden gelezen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Tekens lezen - meldt alle tekens tijdens het schrijven.
- Geen letters lezen - meldt andere tekens dan letters.
- Geen tekens lezen - het lezen van tekens tijdens het schrijven is uitgeschakeld.

Dicteermodus

Met de menu-optie Dicteermodus kunt u kiezen tussen offline of online spraakherkenning. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Gebruik online spraakherkenning wanneer netwerk beschikbaar is - gebruikt online spraakherkenning, indien beschikbaar, anders wordt offline spraakherkenning gebruikt.
- Gebruik altijd offline spraakherkenning - online spraakherkenning is uitgeschakeld.

Opmerking: Deze menu-optie is alleen beschikbaar voor talen met offline spraakherkenning.

Extern toetsenbordindeling

Met het menu-item Externe toetsenbordindeling kunt u instellen welke externe toetsenbordindeling wordt gebruikt.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer een extern toetsenbord is aangesloten.

Schermbrightness

Helderheidinstelling

Met de menu-optie Helderheidinstelling kunt u de helderheid van het scherm wijzigen. Een hoger niveau betekent een helderder scherm maar een kortere levensduur van de batterij.

Schermtime-out

Met de menu-optie Scherm time-out kan een periode van inactiviteit worden ingesteld. Na deze periode schakelt de telefoon over naar de slaapstand om de batterij te sparen. Om de telefoon uit de slaapstand te halen, drukt u op een willekeurige toets. Wanneer de automatische toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, is het toetsenbord van de telefoon ook vergrendeld. Houd in dat geval de asterisktoets langer ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen.

Kleurenschema

Met de menu-optie Kleurenschema kunt u verschillende kleurenschema's voor de telefoonomgeving selecteren. De eerste kleur geeft de tekstkleur aan, de tweede is de achtergrondkleur. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Wit op zwart.
- Zwart op wit.
- Wit op blauw.
- Zwart op geel.

Hoofdmenu Stijl

Met de menu-optie Hoofdmenu Stijl kunt u het grafische uiterlijk van het hoofdmenu veranderen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Pictogrammen en tekst.
- Alleen tekst.
- Alleen pictogrammen.

Tekstgrootte

Met de menu-optie Tekstgrootte kunt u de lettergrootte wijzigen die in de telefoonomgeving wordt gebruikt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Normale tekstgrootte.
- Enorme tekstgrootte - deze optie kan de woordopmaak afbreken, en het is mogelijk dat een enkel woord meerdere regels beslaat.

Notificatie LED-verlichting

Met de menu-optie Notificatie LED-verlichting kunt u het LED-lampje aan de voorkant van de telefoon instellen om meldingen weer te geven. De kleuren van het LED-lampje onderscheiden verschillende soorten meldingen:

- Gemiste oproepen worden aangegeven met rood licht.
- Gemiste SMS-berichten worden aangegeven met blauw licht.
- Andere gemiste gebeurtenissen worden aangegeven met groen licht.

Netwerken

WiFi

Met de menu-optie WiFi kunt u verbinding maken met een WiFi-netwerk.

- Selecteer de menu-optie WiFi inschakelen om de WiFi-verbinding in te schakelen.
- Om verbinding te maken met een WiFi-netwerk, selecteert u het WiFi-netwerk in de Netwerk lijst en selecteert u vervolgens Verbinden met netwerk. Als het WiFi-netwerk met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in.
- Om verbinding te maken met een WiFi-netwerk met behulp van de WPS-knop, selecteert u het WiFi-netwerk in de Netwerklijst en selecteer vervolgens Verbinden met de WPS-drukknop. Druk vervolgens op de WPS-knop op het routerapparaat.
- Om verbinding te maken met een verborgen WiFi-netwerk, selecteert u de menu-optie Verbinding maken met verborgen netwerk. Voer vervolgens de SSID (naam) en het wachtwoord in.

WiFi hotspot

De WiFi hotspot maakt het mogelijk om mobiele data te delen via WiFi.

- Om een WiFi-hotspot te activeren, selecteert u de menu-optie WiFi-hotspot inschakelen.
- De activering van de WiFi-hotspot verbreekt de bestaande WiFi-verbinding.
- Om de WiFi-hotspot uit te schakelen, selecteert u de menu-optie WiFi-hotspot uitschakelen.
- Om de inloggegevens voor het WiFi hotspot-netwerk te wijzigen, selecteert u de menu-optie Instellingen.

Opmerking: Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is.

WiFi-verbinding via tekstbestand

Een WiFi-verbinding kan tot stand worden gebracht met behulp van een tekstbestand dat in het interne geheugen van de telefoon is opgeslagen.

- Kopieer een tekstbestand met de naam wifi.txt naar de hoofdmap van het interne geheugen van de telefoon.
- Schrijf de naam van het WiFi-netwerk op de eerste regel van het bestand.
- Schrijf het netwerkwachtwoord op de tweede regel van het bestand.
- Het wachtwoord in het bestand zal automatisch worden gebruikt wanneer verbinding wordt gemaakt met dit specifieke netwerk.

Bluetooth

Met de menu-optie Bluetooth kunt u Bluetooth-apparaten verbinden en beheren.

Een nieuw apparaat koppelen

- Schakel de koppelingsmodus op het Bluetooth-apparaat in. Sommige apparaten staan standaard in de koppelingsmodus wanneer ze zijn ingeschakeld en geen signaal hebben. Andere apparaten hebben een speciale toets of toetsencombinatie die de koppelingsmodus activeert. Dit is apparaat-specifiek en kan worden gevonden in de handleiding van het apparaat.
- Schakel Bluetooth in en selecteer de optie Scan voor apparaten. Het scannen kan tot een halve minuut duren, daarna worden de dichtstbijzijnde apparaten getoond.
- Om een apparaat te koppelen, selecteert u het apparaat in de lijst. Het koppelen kan een paar seconden duren.
- Sommige apparaten vereisen het invoeren van een verificatiecode. In dit geval voert u een code in die door de BlindShell-telefoon aan het externe Bluetooth-apparaat wordt verstrekt.
- Om een apparaat te ontkoppelen, selecteert u het apparaat in de lijst Gekoppelde apparaten en selecteert u Apparaat ontkoppelen.

Verbinden en ontkoppelen van een apparaat

Een nieuw gekoppeld apparaat wordt meestal automatisch verbonden. Om een apparaat handmatig te verbinden (of te ontkoppelen), selecteert u het apparaat in de lijst Gekoppelde apparaten en selecteert u Apparaat verbinden (of Apparaat ontkoppelen).

Belangrijk aandachtspunt:

- Voordat u een gekoppeld apparaat kunt aansluiten, moet u het meestal eerst inschakelen met een schakelaar op het apparaat. Sommige apparaten schakelen zichzelf uit na een periode van inactiviteit.
- Er is een groot aantal Bluetooth-apparaten op de markt. BlindShell kan geen compatibiliteit met elk beschikbaar apparaat garanderen. Wellicht kan uw BlindShell-leverancier u advies geven of een getest model aanbieden.
- Vanwege mogelijke radio-interferentie en vanwege de aard van het Bluetooth-protocol zelf, is er geen garantie dat een apparaat tijdens de scanprocedure zal worden gevonden. Als het apparaat niet wordt vermeld of niet kan worden gekoppeld, controleer dan of het nog steeds in de koppelingsmodus staat en probeer de handeling opnieuw. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of er geen sterke storingsbron in uw omgeving is, zoals een ander Bluetooth-apparaat, een WiFi-router of andere radioapparaten.

Verbindingstest

De menu-optie Verbindingstest voert een internetverbindingstest uit. Het resultaat geeft informatie over de kwaliteit van de internetverbinding en de beschikbaarheid van de BlindShell-server.

Mobiele gegevens

Met de menu-optie Mobiele gegevens kunt u mobiele gegevens beheren.

- Met de menu-optie mobiele gegevens kunt u de mobiele gegevens in- en uitschakelen.
- Met de menu-optie APN-instellingen kunt u toegangspunten voor mobiele netwerken configureren.
- De menu-optie Mobiel gegevensgebruik bevat gedetailleerde informatie over het mobiele gegevensgebruik.

Opmerking: Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is.

PIN-code

Met de menu-optie PIN-code kunt u de PIN-code activeren, deactiveren of wijzigen. Indien geactiveerd, wordt de PIN-code gevraagd bij het opstarten van de telefoon.

Belangrijk aandachtspunt: Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt uw SIM-kaart tijdelijk geblokkeerd en wordt er om een PUK-code gevraagd. Als u de PUK-code tien keer achter elkaar foutief invoert, wordt uw SIM-kaart permanent geblokkeerd.

Opmerking: Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er een SIM-kaart in de telefoon aanwezig is.

SIM-kaarten

Met de menu-optie SIM-kaarten kunt u de gewenste SIM-kaarten beheren voor uitgaande gesprekken, uitgaande berichten of gegevensoverdracht.

Opmerking: Deze menu-optie is alleen beschikbaar als er twee SIM-kaarten in de telefoon aanwezig zijn.

Favoriete applicaties

Met de menu-optie Favoriete applicaties kunt u de lijst met favoriete applicaties beheren. Deze lijst is snel toegankelijk door op de actieknop aan de zijkant te drukken. Om een applicatie aan de favorieten toe te voegen, selecteert u de menu-optie Voeg favoriete applicatie toe. Om een applicatie uit de favorieten te verwijderen of de positie ervan in de lijst te wijzigen, selecteert u de applicatie door op de bevestigingstoets te drukken.

Datum, tijd en tijdzone

Met de menu-opties Datum, tijd en tijdzone kunt u automatische tijd en datum in- en uitschakelen, en tijdformaat en tijdzone wijzigen.

- Om de automatische tijd en datum in te schakelen, selecteert u de menu-optie Tijd en datum. Als deze optie is ingeschakeld, worden de tijd en datum automatisch ingesteld via het netwerk. De SIM-kaart moet in de telefoon aanwezig zijn.

- Om de tijd en datum handmatig in te stellen, moet u eerst de automatische tijd en datum uitschakelen.

Taal

Met de menu-optie Taal kunt u de standaardtaal van de telefoon wijzigen.

BlindShell update

Met de menu-optie BlindShell update kan de software van de telefoon worden bijgewerkt. De updates bieden nieuwe functies, verbeteren huidige functies en verhelpen bugs. Een nieuwe update wordt aangekondigd via een melding.

Om handmatig te controleren op updates, selecteert u de menu-optie Controleren op updates. Als er een update beschikbaar is, selecteert u Update downloaden en vervolgens installeert u de update. Om een update te installeren, is een internetverbinding via WiFi vereist.

Belangrijk aandachtspunt:

- Het update-proces duurt enkele minuten. U wordt geïnformeerd over de voortgang van de update. Tijdens de update spreekt de telefoon met een robotachtige stem.
- Schakel uw telefoon niet uit en verricht geen andere handelingen met uw telefoon tijdens het update-proces. Als u dit wel doet, kan de software van de telefoon beschadigd raken, waardoor de telefoon ter reparatie moet worden opgestuurd.

Over de telefoon

De menu-optie Over de telefoon biedt technische informatie over de telefoon, zoals de softwareversie, opslaggebruik en netwerkinformatie. Het geeft ook toegang tot een Servicemenu met een fabrieksreset en back-up optie.

Servicemenu

Het servicemenu is een functionaliteit die bepaalde servicehandelingen vereenvoudigt. Voor het servicemenu moet de telefoon in een speciale modus herstarten, buiten het gewone besturingssysteem om. Het servicemenu maakt geen deel uit van het BlindShell-systeem en het ontvangen van oproepen en andere standaard telefoonfuncties zijn niet beschikbaar. Om het Service menu te verlaten, selecteert u de menu-optie Herstart telefoon.

Back-upgegevens

De functionaliteit Back-up gegevens maakt een bestand met interne gebruikersgegevens. De back-up functie slaat geen gegevens op die zijn opgeslagen op een SD-geheugenkaart, indien aanwezig.

- Als u een back-up van gegevens wilt maken, plaatst u een SD-geheugenkaart of een USB C-flashstation in de telefoon. Als beide aanwezig zijn, wordt het back-upbestand opgeslagen op de SD-geheugenkaart.
- Selecteer de menu-optie Back-up gegevens.
- Selecteer het type back-up, de volgende opties zijn beschikbaar: Volledige back-up slaat gebruikersvoorkeuren van applicaties en telefooninstellingen op, inclusief media die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Volledige back-up zonder media doet hetzelfde met uitzondering van media die in het interne geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.
- Het back-up bestand wordt gegenereerd met de tijdstempel en de extensie ".backup".

Gegevens herstellen

Met de functionaliteit Gegevens herstellen kunt u gebruikersgegevens herstellen vanuit een back-upbestand dat eerder is gemaakt met de functionaliteit Back-upgegevens. Het back-upbestand moet worden opgeslagen op een SD-geheugenkaart of een USB C-flashstation dat in de telefoon is geplaatst.

Belangrijk aandachtspunt: Uw gegevens worden overschreven door de bewerking Gegevens herstellen.

Fabrieksinstellingen

Met de menu-optie Fabrieksinstellingen voert u een zogenaamde fabrieksreset van de telefoon uit. Tijdens deze handeling worden alle gebruikersgegevens gewist en keert de telefoon terug naar de oorspronkelijke staat.

4.7 Handleiding

De menu-optie Handleiding bevat dit document gestructureerd in secties.

4.8 Schakel de telefoon uit

Met de menu-optie Schakel de telefoon uit schakelt u de telefoon uit. De bevestiging van deze actie is vereist.

4.9 Gemiste meldingen en informatie over telefoonstatus

Om statusinformatie over de telefoon weer te geven, drukt u op de linker actie-toets. Deze actie is op elk moment beschikbaar tijdens het gebruik van de telefoon. De lijst bevat de volgende informatie:

- Meldingen - selecteer om gemiste meldingen weer te geven.
- Actuele tijd en datum - selecteer om de Agenda-applicatie te openen.
- WiFi-status - selecteer om WiFi-instellingen te openen.
- Netwerkstatus - selecteer om mobiele gegevens in- of uit te schakelen.
- Batterijstatus.
- Bluetooth-status - selecteer om Bluetooth-instellingen te openen.

4.10 Favoriete applicaties

Om snel toegang te krijgen tot favoriete toepassingen, drukt u op de actieknoop aan de zijkant. Hiermee opent u een aanpasbare lijst met applicaties die aan favorieten zijn toegevoegd. Als u een applicatie aan favorieten wilt toevoegen, selecteert u de menu-optie Voeg favoriete applicatie toe. Voor verdere aanpassingen, zoals het ordenen van de applicaties in de lijst, gaat u naar de telefooninstellingen.

5 Technische gegevens

5.1 Connectiviteit

- GSM (2G): 850/900/1800/1900 MHz
- WCDMA (3G): B1/B2/B4/B5/B8
- FDD-LTE (4G): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66/B71
- TDD-LTE (4G): B38/B40/B41
- VoLTE
- Bluetooth: 4.2
- WiFi: 2,4 GHz + 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- GNSS: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
- FM-radio-ontvanger
- NFC

5.2 Hardware

- Afmetingen: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm
- Gewicht: 100 g (telefoon), 49 g (batterij)
- Beeldscherm: 2,83" (480 x 640)
- Geheugen (RAM): 2 GB
- Interne opslag: 16 GB
- Externe opslag: micro SD-geheugenkaart tot 128 GB (FAT32)
- Camera: 13 MP
- SIM-kaart: Dubbele micro-SIM
- Batterij: 3000 mAh
- Luidspreker: 1.5 W
- Microfoon: Dubbele microfoon, ruisonderdrukking
- 3,5 stereo audio-aansluiting
- USB Type-C
- Knoppen: SOS, Volume, Actieknop aan de zijkant
- Indicatie LED
- Camera LED-zaklamp
- LED-zaklamp

5.3 Sensors

- Magnetometer
- Barometer
- Versnellingsmeter
- Gyroscop
- Nabijheidssensor

5.4 Certificeringen

- CE, FCC, IC, ICASA, ACMA, RoHS, HAC, UN38.3, MSDS, IEC 62133
- HAC: M3/T3

6 Regelmatig gebruik en veiligheidsinformatie

Persoonlijk gebruik

- Haal de telefoon niet uit elkaar. De enige verwijderbare onderdelen van de telefoon zijn de achterklep en de batterij. - Voor toegang tot het batterijcompartiment is geen gereedschap nodig. Als u de telefoon uit elkaar haalt, vervalt de garantie.
- Gebruik de telefoon alleen voor het bedoelde gebruik en uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de telefoon of het milieu als gevolg van verkeerd gebruik.
- Gebruik geen beschadigde telefoon. Controleer voor elk gebruik of de telefoon intact is. Het gebruik van een beschadigde telefoon kan leiden tot letsel of verdere schade. Neem contact op met uw verdeler voor reparaties binnen en buiten de garantieperiode.
- Schakel de telefoon uit wanneer het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan veroorzaken. Volg alle instructies in beperkte gebieden.
- De fabrikant kan de correcte werking van de telefoon niet garanderen wanneer andere dan originele accessoires worden gebruikt. Indien u beslist om andere dan de originele accessoires te gebruiken, gelieve dit eerst te overleggen met uw verdeler.
- Luister niet gedurende lange tijd naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen. De luidspreker en de hoofdtelefoon van de telefoon staan erg hard. Wees extra voorzichtig wanneer u het hoogste volume gebruikt, vooral wanneer de telefoon dicht bij uw oren is.
- Zorg ervoor dat u de omgevingsgeluiden kunt horen wanneer u met een koptelefoon reist. Dit kan u in potentieel gevaarlijke situaties in het verkeer brengen.
- De telefoon is niet water- of stofbestendig, houd hem droog. Voorkom elk contact met vloeistof.
- Gebruik de telefoon niet in stoffige, rokerige of vochtige omgevingen, of in de buurt van magnetische velden. Er kan vuil of vocht in de telefoon komen, wat hem kan beschadigen.
- Houd de telefoon uit de buurt van warmtebronnen en uit direct zonlicht. Laat uw telefoon niet achter in een voertuig of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan oplopen dan 45° C (113° F).
- Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden, fietsen of in andere voertuigen. Houd u altijd aan de plaatselijke wetgeving inzake het gebruik van mobiele apparaten.

- Plaats de telefoon of een van de accessoires niet in een magnetron.
- Plaats de telefoon niet in de buurt van creditcards of andere opslagmedia met informatie op magnetische strips. De luidspreker van de telefoon bevat een magneet die informatie op magnetische opslagmedia kan wissen.

Batterij en opladen

- Probeer de batterij tussen 5°C en 30°C (41°F en 86°F) te houden voor optimale prestaties. Korte blootstelling aan warmere of koudere temperaturen is niet schadelijk voor de batterij, maar langdurige blootstelling aan extreme temperaturen vermindert de capaciteit en de levensduur van de batterij.
- Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij wanneer de telefoon gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. In het ideale geval wordt de batterij opgeladen tot ongeveer 60% wanneer ze wordt opgeborgen. Dit verlengt de levensduur van de batterij en behoudt zijn maximale capaciteit.
- De batterij niet uit elkaar halen, snijden, pletten, buigen, doorboren of op een andere manier beschadigen. De accu kan bij beschadiging in brand vliegen. Dit is niet erg waarschijnlijk, maar het is mogelijk. Houd er rekening mee dat de batterij het gevaarlijkste onderdeel van de telefoon is.
- Probeer de batterij niet te repareren of aan te passen. Dit kan leiden tot beschadiging van de batterij, wat brand of een explosie kan veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij, oplader of oplaadkabel. De batterij of de lader kunnen in brand vliegen of een elektrische schok veroorzaken.
- Gebruik alleen de originele batterij, en gebruik de originele batterij alleen voor de telefoon waarvoor hij bedoeld is. - De batterij is uitsluitend ontworpen voor dit specifieke toestel. Andere batterijen passen mogelijk niet goed, of hebben andere eigenschappen en kunnen uw telefoon beschadigen.
- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en zullen na een paar honderd keer opladen hun capaciteit verliezen.
- De stroomadapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Wanneer u de stroomadapter uit het stopcontact haalt, trek dan aan de adapter, nooit aan de kabel.
- Trek de stekker van de adapter uit het stopcontact als u hem niet gebruikt.
- Pak de adapter nooit met natte handen vast.

Recycleren

Lever uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd in bij speciale inzamelpunten. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd ge-

meentelijk afval. Als u niet zeker weet hoe u uw telefoon, de accessoires of de verpakking moet weggooien, neem dan contact op met uw verdeler.

Kleine kinderen en dieren

Houd de telefoon en de accessoires uit de buurt van kleine kinderen en dieren. Uw telefoon bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, plastic elementen en onderdelen met scherpe randen die letsel kunnen veroorzaken of kunnen leiden tot verstikkingsgevaar.

Interferentie met medische apparaten

- Het gebruik van radiozendapparatuur, waaronder draadloze telefoons, kan de werking van onvoldoende afgeschermd medische hulpmiddelen verstoren. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om te bepalen of het voldoende is afgeschermd van externe radio-energie.
- Om mogelijke interferentie te voorkomen, adviseren fabrikanten van geïmplanterde medische apparatuur een minimale afstand van 15,3 centimeter (6 inches) tussen een draadloos apparaat en het medische apparaat. Personen met dergelijke apparaten moeten:
 - Houd het draadloze apparaat altijd meer dan 15,3 centimeter (6 inch) verwijderd van het medische apparaat.
 - Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
 - Houd het draadloze apparaat tegen het oor tegenover het medische apparaat.
 - Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er interferentie optreedt.
 - Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor het geïmplanterde medische apparaat.
 - Als u vragen hebt over het gebruik van uw draadloze apparaat in combinatie met een geïmplanterd medisch apparaat, raadpleeg dan uw zorgverlener.

SAR-waarden

- De telefoon is geclassificeerd voor gebruik in een typische huiselijke omgeving.
- De hoogste SAR-waarde (Specific Absorption Rate) die volgens de CE-norm voor de telefoon is gerapporteerd, bedraagt bij gebruik op het hoofd 0,623 W/kg (10 g), en bij gebruik op het lichaam 1,474 W/kg (10 g). De minimale afstand voor op het lichaam gedragen gebruik is 5mm.

Beschikbaarheid van software en diensten

De software van de telefoon wordt aangeboden zoals hij is, met al zijn mogelijke gebreken. De fabrikant doet geen beweringen, beloftes of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid van de inhoud die door de telefoon wordt verstrekt, en wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid af voor fouten en omissies die door de telefoon worden gepresenteerd.

- Sommige toepassingen vereisen een internetverbinding om goed te kunnen werken.
- Soms kunnen sommige diensten niet beschikbaar zijn als gevolg van uitval van de server of omdat diensten van derden niet beschikbaar zijn.
- Informatie die door de telefoon wordt verstrekt is mogelijk niet altijd accuraat (bijv. locatie, resultaten van kleurherkenning, weersinformatie, etc.).
- De fabrikant is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor inhoud van derden die door de toepassingen van de telefoon wordt gepresenteerd.
- De software wordt voortdurend bijgewerkt. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de software of de inhoud van de gebruikershandleiding zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Neem in geval van twijfel contact op met de verdeler

Als u vragen of problemen hebt, of in een situatie komt waarin u hulp nodig hebt, neem dan contact op met de verdeler bij wie u de telefoon hebt gekocht. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van de telefoon via een e-mail aan **info@blindshell.com**.

7 Regelgevende informatie

Informatie over de regelgeving - EU

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Bij deze verklaart Matapo a.s. dat de radioapparatuur van het type mobiele telefoon in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: **www.blindshell.com/conformity**

Informatie over de verwijdering voor gebruikers van AEEA

Dit symbool op het product en/of de begeleidende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet vermengd mag worden met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste verwerking, terugwinning en recyclage, gelieve dit product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis zal worden aanvaard. In sommige landen kunt u uw producten ook bij uw plaatselijke verkooppunt inleveren bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product.

Als u dit product op de juiste wijze verwijderd, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking.

Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt.

Er kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist verwijderen van dit afval, in overeenstemming met uw nationale wetgeving.

Beperkingen in 5GHz band

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt in het bereik van 5,15GHz tot 5,35GHz in de volgende landen:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK

Frequentiebanden en vermogen

Volgens de richtlijn radioapparatuur (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU is het maximale uitgangsvermogen van de apparatuur als volgt:

- GSM - 900MHz: 33,72dBm; 1800MHz: 29,8dBm
- WCDMA - B1: 22,72dBm; B2: 23,32dBm
- LTE-FDD - B1: 23,22dBm; B3: 23,81dBm; B7: 23,38dBm; B8: 23,52dBm; B20: 23,42dBm; B28: 23,7dBm
- LTE-TDD - B38: 23,6dBm; B40: 23,59dBm; B41: 23,82dBm;
- Bluetooth - BR/EDR: 6,01dBm; BLE: 5,15dBm
- 2.4GHz WIFI - 11b: 15,45dBm; 11g: 14,03dBm; 11n(20): 13,44dBm; 11n(40): 14,17dBm
- 5GHz WIFI - 5,2GHz: 17,68dBm; 5,8GHz: 16,03dBm
- NFC: 0,000000261mW

8 Juridische informatie

Beperkte garantie

De telefoon wordt gedekt door beperkte garantie. De garantieperiode is als volgt in

- Verenigde Staten, Canada: twaalf (12) maanden;
- Europese Unie, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland: vierentwintig (24) maanden.

Neem contact op met uw verdeler voor de garantieperiode voor landen en/of regio's die niet in dit document zijn vermeld.

De minimale levensduur van een batterij bedraagt 12 maanden. Gedurende deze periode zou slechts een geringe afname van de capaciteit mogen optreden. Na deze periode wordt elke afname van de capaciteit of elk verlies van functie beschouwd als veroorzaakt door gewone slijtage. De beperkte garantie gaat in op de dag van aankoop van het product door de eerste eindgebruiker. De beperkte garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap. Alle andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden afgewezen.

In de volgende gevallen wordt geen garantie verleend, ongeacht het opgetreden defect:

- Normale slijtage van het product en vermindering van de batterijlading door het gebruik.
- Schade als gevolg van onjuist gebruik, blootstelling aan vocht of vloeistof, of warmtebron.
- Schade als gevolg van het gebruik van accessoires of aansluitingen die niet door de fabrikant zijn geleverd.
- Schade veroorzaakt door het laten vallen van het toestel of door het uitoefenen van overmatige druk, waardoor barsten of breuk van onderdelen van het toestel ontstaan.
- Het niet in acht nemen van de informatie in het document Veiligheid, regelgeving en wettelijke informatie.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van een niet-originele batterij, of door het gebruik van de BlindShell batterij in een ander apparaat.
- Schade als gevolg van een reparatiepoging door onbevoegd personeel.

Deze beperkte garantie geldt niet voor storingen in netwerkdiensten, zoals uitval van mobiele of wifi-netwerken.

De software van het apparaat wordt aangeboden in de staat waarin het zich bevindt, met alle mogelijke gebreken.

Wij raden u aan minstens één keer per maand een back-up te maken van de gebruikersgegevens om ongewenst gegevensverlies te voorkomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies als gevolg van een defect aan het apparaat, reparatie of vervanging van het apparaat.

Beperkingen van de aansprakelijkheid van de fabrikant

De hierin beschreven garantie beschrijft de volledige omvang van Matapo's verantwoordelijkheden, en de exclusieve remedie met betrekking tot het product. In geen geval zal Matapo aansprakelijk zijn voor schade boven de aankoopprijs van het product of voor, zonder beperking, commercieel verlies van welke aard dan ook; verlies van gebruik, tijd, data, reputatie, kansen, goodwill, winst of besparingen; ongemak; of incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade.

Matapo's geautoriseerde verdelers dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of misbruik van het apparaat.